

PRIJEMALA



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: AU120, AU122 i
AU123**


NAMEN

Moretti prijemalke so zasnovane za lažje prijemanje predmetov osebam z motoričnimi težavami rok in prstov.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Za pravilno uporabo naprave si oglejte ta priročnik.
- Za pravilno uporabo naprave se posvetujte z svojim zdravnikom ali terapevtom.
- Življenjska doba pripomočka je določena z obrabo nepopravljivih in/ali zamenljivih delov.
- Vedno bodite previdni v bližini otrok.

AU120 Prijemalka z vrtljivo glavo z magnetom in kavljem – 67 cm

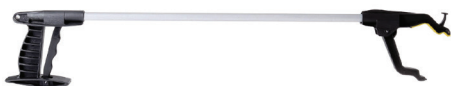

Nastavljiva vodoravno, navpično ali v vmesnih položajih. Opremljena z nazobčanim koncem za boljši oprijem tudi manjših predmetov; opremljena z majhnim kavljem/kavljičem na zgornjem koncu za prijem oblačil ali drugih stvari ter majhnim magnetom za privlačenje kovinskih predmetov.

AU122 Prijemalka z nastavljivo glavo – 71 cm



Nastavljiva vodoravno, navpično ali v vmesnih položajih. Opremljena z gumijasto obloženo nedrsečo kleščo za varen prijem kateregakoli predmeta.

AU123 Prijemalka – 74 cm



Opremljena z nazobčanim koncem za boljši oprijem tudi manjših predmetov.

PRED VSAKO UPORABO

- Vedno preverite obrabo vključenih mehanskih delov, da zagotovite varno uporabo naprave za ljudi in stvari.
- Preverite pravilno sestavljanje naprave.

OPOZORILA PRI UPORABI

- Ne poskušajte prijeti posebej težkih predmetov (več kot 2 kg), saj bi jih bilo zaradi dolžine naprave težko varno dvigniti (to lahko povzroči padec predmeta z morebitnim zlomom in nevarnostjo za ljudi).

KAKO SE UPORABLJA

Uporaba prijemalk Moretti je zelo enostavna. Preprosto držite napravo in jo previdno približajte predmetu, nato pritisnite ročico, ki se nahaja pri ročaju, da zgrabite predmet. Ko je predmet premaknjen in ponovno nameščen na varno površino, spustite ročico, da sprostite predmet.

Pri modelu AU120 je mogoče nastaviti vilico vodoravno, navpično ali v vmesne položaje glede na ročaj. Za vrtenje vilice primite nosilec klešč z eno roko, z drugo pa vilico. Zavrtite ročico v želeni položaj in pazite, da vse ostane popolnoma sestavljeno.

Pri modelu AU122 je mogoče nastaviti vilice vodoravno, navpično in v vmesne položaje glede na ročaj. Za vrtenje vilic primite nosilec klešč z eno roko, z drugo pa vilico. Povlecite in zavrtite ročico v želeni položaj in pazite, da vse ostane popolnoma sestavljeno.

VZDRŽEVANJE

Pripomočki iz linije MOPEDIA by Moretti so skrbno preverjeni in imajo oznako CE ob vstopu na trg. V primeru popravil je treba uporabljati le originalne rezervne dele in dodatke.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA

Čiščenje

Uporabite le vlažno krpo in nevtralno milo. Nato dobro osušite pred uporabo.

Dezinfekcija

Če je potrebno razkužiti izdelek, uporabite običajno nevtralno razkuževalno čistilo.