

INVALIDSKI VOZIČEK ZA DEBELE BOLNIKE PLUS



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

SKU: CP300-60

NAMEN

Ta invalidski voziček je zasnovan za premikanje oseb z omejeno mobilnostjo in se lahko uporablja za samostojno gibanje (če je opremljen z velikimi zadnjimi kolesi) ali s pomočjo spremlevalca. Vendar je v vseh primerih potrebna intervencija spremlevalca za različne prilagoditve, ki jih potrebujete.

SPLOŠNA OPOZORILA

- TEGA izdelka NE uporabljajte brez predhodnega branja in razumevanja tega navodila za uporabo.
- Posvetujte se s svojim zdravnikom ali terapevtom, da določite prilagoditev in pravilno uporabo.
- Zapakiran voziček hranite stran od virov toplote.
- DELOVNA DOBA – omejitev uporabe je določena z obrabo nenadomestljivih delov.
- VEDNO imejte roke in prste stran od gibljivih delov, da preprečite poškodbe.
- NE dovolite otrokom, da se igrajo ali upravljajo z invalidskim vozičkom.
- Zložite voziček, kot je razloženo v tem priročniku, in ga dvignite za ročaje.
- NE poskušajte dvigniti invalidskega vozička za dele, ki jih je mogoče odstraniti.


SPLOŠEN OPIS

Komponente se lahko razlikujejo glede na izbrani model:



- A - Okvir
- B - Komplet ključev za sestavljanje

C - Zasukljivi naslon za noge

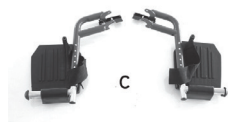

- E - Kolesa 60 cm (premer 60 cm) model Start

MONTAŽA/RAZSTAVLJANJE



Odpiranje


- Primite ročaje in povlecite navzven, nato pritisnite sedež, dokler se invalidski voziček popolnoma ne odpre



Zlaganje

- Močno dvignite sedež in zaprite voziček. Skupaj potisnite ročaje.

Namestite/odstranite naslon za roko

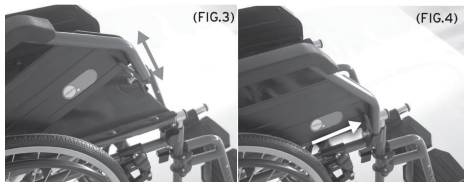

- Postavite zadnji del naslona za roko v zadnjo priključno odprtino, nato ga zataknite za sprednji del z zasukom (SL.3)
- Za odstranitev odklenite naslon za roko s pritiskom na sprednjo sprostitveno ročico, nato ga zasukajte in izvlecite s potegom zadnje sprostitvene ročice (SLIKA 4).

Namestite/odstranite oporo za noge



- Sestavite oporo za noge z zasukom ali dvigovanjem tako, da postavite tečajne ploščice opore na noge na zatiče na okviru invalidskega vozička. Potisnite naslon za noge proti notranjosti invalidskega vozička, dokler se ne zaskoči (SLIKA 5)
- Odstranite naslon za noge

s pritiskom na sprostitveno ročico, zavrtnite navzven, nato dvignite naslon za noge z zatičev.

Nastavite zasukljivo oporo za noge



- Za nastavev dolžine opore za noge odklenite varnostno ročico, odklenite zadnjo varnostno ročico, nato pritisnite gumb, potisnite cev do želenega položaja, nato ponovno zaklenite varnostno ročico. (SLIKA 6)


Namestite/odstranite kolesa 60 cm

Postavite kolo v osrednjo luknjo na okvirju invalidskega vozička

- Namestite veliko kolo in ga blokirajte z matico
- Odvijte matico in odstranite veliko kolo



Nastavite zavore s kolesi 60 cm

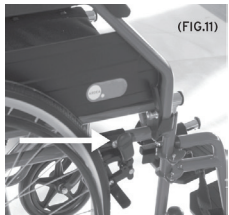

- Ko so nameščena 60 cm kolesa, namestite zavoro na ohišje. Zaklenite napravo z zategovanjem imbus vijakov (SL.11) Upošteвайте, da morate zavoro nastaviti tako, da ustvari pravi pritisk za varno ustavljanje koles.

PRED UPORABO

- Preglejte, ali je okvir poškodovan. Preverite razpoke in rjo na ceveh, da zagotovite varnost ljudi in predmetov
- Preverite pravilnost sestavnih delov, da zagotovite varno uporabo
- Preverite, ali je sedež popolnoma odprt. Če ni, potisnite sedež navzdol iz stranskega okvirja.
- Preverite delovanje zavor

UPORABA

Sedenje v invalidski voziček

1. Postavite invalidski voziček čim bliže k sedežu, kamor boste sedli
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažji vstop
3. Oprite se z rokami na okvir in se počasi spustite na sedež

Vstajanje iz invalidskega vozička

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažje vstajanje
3. Prenesite težo telesa na ciljano sedišče

Stopnice in višinske razlike

PLEZANJE

Postavite invalidski voziček ob robnik, preko katerega boste prešli. Uravnajte voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa, toliko da jih položite na oviro. Nagnite trup naprej in močno potisnite ročaj. Nadaljujte s potiskanjem, dokler se zadnja kolesa ne povzpnejo čez oviro.

SPUŠČANJE

Za spuščanje po stopnicah sledite obratnemu postopku, postavite zadnji del invalidskega vozička ob robnik, močno držite ročaje in počasi spustite z ovire; nato uravnajte voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa in zaključite spuščanje.

Uporaba naslona za roko

Naslون za roko je lahko zložljiv, odstranljiv ali zložljiv in odstranljiv

Zasuk nazaj – ta funkcija je uporabna pri vstopu ali izstopu iz vozička.
Pritisnite sprostitveno ročico in zavrtite naslon za roko

Uporaba koles 60 cm

Zadnja kolesa 60 cm se uporabljajo pri samostojnem gibanju (ko se poganjate sami).
Primitte obroč in potisnite v zeleno smer

Prenos

Invalidski voziček je zasnovan za enostavno prenašanje.

Ko odstranite naslon za roke in noge, ga lahko zložite in preprosto postavite v prtljažnik avtomobila. Če to ni mogoče, postavite invalidski voziček pred zadnji sedež avtomobila tako, da bo stabilen in da ne bo mogel zdrsni. Privežite ga z varnostnim pasom.

VZDRŽEVANJE

Vozički podjetja Moretti so temeljito preverjeni in označeni z oznako EC po lansiranju na trg. Zaradi varnosti pacientov in uporabnikov priporočamo, da vsakih 2 leti dovolite proizvajalcu ali pooblaščenemu servisu, da preveri napravo. V primeru popravila uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Pred uporabo upoštevajte poglavje »PRED UPORABO«. Invalidski voziček Moretti ARDEA ONE zahteva malo osnovnega in občasnega vzdrževanja, spodaj so navedeni redni pregledi:
kakovost zaviranja – mesečno
čiščenje sedeža – po potrebi

ČIŠČENJE

Prevlaka in podloga

Prevlaka in podloga sta iz najlona. Očistite z mlačno vodo in blagim milom.

Okvir in kovinski deli

Očistite z mlačno vodo in blagim milom. Obrišite z mehko krpo, da ne opraskate barve.

Zavore in kolesa

Kolesa očistite z mlačno vodo in blagim milom. Posebno pozornost posvetite sušenju koles – nevarno je uporabljati invalidski voziček z mokrimi kolesi.

Dezinfekcija

Če morate razkužiti napravo, uporabite običajno sredstvo za razkuževanje.

