

# INVALIDSKI VOZIČEK HELIOS/HELIOS PRO



## NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si  
Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: CP785-46 in  
CP790-46**

## NAMEN


Ta invalidski voziček je zasnovan za premikanje oseb z omejeno mobilnostjo in se lahko uporablja za samostojno gibanje (če je opremljen z velikimi zadnjimi kolesi) ali s pomočjo spremljevalca. Vendar je v vseh primerih potrebna intervencija spremljevalca za različne prilagoditve, ki jih potrebujete.

## SPLOŠNA OPOZORILA

- TEGA izdelka NE uporabljajte brez predhodnega branja in razumevanja tega navodila za uporabo.
- Posvetujte se s svojim zdravnikom ali terapevtom, da določite prilagoditev in pravilno uporabo.
- Zapakiran voziček hranite stran od virov toplote.
- DELOVNA DOBA – omejitev uporabe je določena z obrabo nenadomestljivih delov.
- VEDNO imejte roke in prste stran od gibljivih delov, da preprečite poškodbe.
- NE dovolite otrokom, da se igrajo ali upravljajo z invalidskim vozičkom.
- Zložite voziček, kot je razloženo v tem priročniku, in ga dvignite za ročaje.
- NE poskušajte dvigniti invalidskega vozička za dele, ki jih je mogoče odstraniti.

## SPLOŠEN OPIS

KOMPONENTE SE LAHKO MENJAJO GLEDE NA IZBRANI MODEL:  
A - Okvir  
B - Komplet ključev za sestavljanje

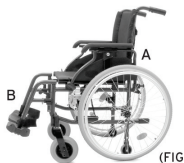

(FIG)

## MONTAŽA/RAZSTAVLJANJE



(FIG.2)

### Odpiranje

• Primite ročaje in povlecite navzven, nato pritisnite sedež, dokler se invalidski voziček popolnoma ne odpre. (Sl.2)




(FIG.3)

## Zlaganje

• Močno dvignite sedež in zaprite voziček. Pritisnite ročaje skupaj. (Sl.3)

## Namestitev/odstranitev naslona za roko

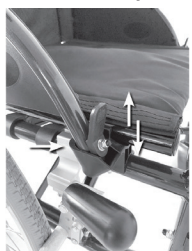

- Namestite zadnji del naslona za roko v zadnjo priključno odprtino, nato jih pritrdite na sprednji del tako, da jih obrnete (Sl.4)
- Za odstranitev odklenite naslon za roko s potiskom sprednje sprostivne ročice, nato jih obrnite in izvlecite s potegom zadnje sprostivne ročice (Sl.4).

## Namestitev/odstranitev naslona za noge

- Sestavite naslon za noge, ki se obrača ali dviga, tako da postavite ploščice tečajev naslona za noge na zatiče tečajev na okviru invalidskega vozička. Pritisnite naslon za noge proti notranjosti vozička, dokler ne zaskoči (Sl.5)
- Odstranite naslon za noge s potiskom sprostivne ročice, ga obrnite navzven in dvignite z zatičev.



## Nastavitev vrtljivega naslona za noge



- Za nastavitev dolžine naslona za noge odklenite varnostno ročico, odklenite zadnjo varnostno ročico, nato pritisnite gumb, potisnite cev do zelenega položaja in ponovno zaklenite varnostno ročico. (Sl.6)

## Elastičen nastavljen naslon (samo CP790)


Naslon za hrbet modela CP790-46 je elastičen in nastavljen. Za nastavitev napetosti naslona:

- Odstranite blazino z naslona;
- Odpnite velcro trakove;
- Postavite pacienta tako, da lahko premika trup;
- Zaprite trakove;
- Ponovno namestite blazino.

## Nastavitev podnožja

Za nastavitev kota podnožja:

- Odpustite vijak na zunanji strani podnožja (Sl.7)
- Nastavite kot podnožja;
- Zategnite vijak.

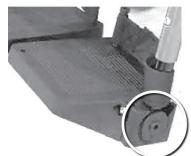

## Nastavitev višine zadnjih koles



Za nastavitev višine zadnjih koles:

- Odstranite kolesa s hitro sprostivjo;
- Odpustite vijake adapterja koles (Sl.8)
- Nastavite adapter koles na željeno višino;
- Zategnite vijake in matico;
- Ponovno namestite kolesa.

## Nastavitev sprednjih koles

Za spremembo višine sprednjih koles:

- Odpustite vijak, ki pritruje kolo na vilico (Sl.9);
- Odstranite kolesce in vijak;
- Izberite zeleno odprtino;
- Vstavite kolesce in zategnite



vijak in matico.

## Nastavitev globine (samo CP790)

Za nastavitev globine sedeža:

- Odvijte 4 vijake, ki pritrjujejo navpični nosilec na sedež in spodnji okvir (Sl.10);
- Po potrebi premaknite nosilec sedeža naprej ali nazaj;
- Privijte vijake v pravičen položaj;
- Nastavite sedež z večanjem ali zmanjševanjem sedežne površine prek velcro trakov.



## Nastavitev višine potisnih ročajev (samo CP790)



Za nastavitev višine potisnega ročaja odпустite ročice na stranskih koncih naslona, nastavite ročaje na želeno višino in zategnite ročice. (Sl.11)

## UPORABA

### Sedenje v invalidski voziček

1. Postavite invalidski voziček čim bliže k sedežu, kamor boste sedli
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažji vstop
3. Oprite se z rokami na okvir in se počasi spustite na sedež

### Vstajanje iz invalidskega vozička

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažje vstajanje
3. Prenesite težo telesa na ciljano sedišče

### Stopnice in višinske razlike

#### PLEZANJE

Postavite invalidski voziček ob robnik, preko katerega boste prešli. Uravnajte voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa, toliko da jih položite na oviro. Nagnite trup naprej in močno potisnite ročaj. Nadaljujte s potiskanjem, dokler se zadnja kolesa ne povzpnejo čez oviro.

#### SPUŠČANJE

Za spuščanje po stopnicah sledite obratnemu postopku, postavite zadnji del invalidskega vozička ob robnik, močno držite ročaje in počasi spustite z ovire; nato uravnajte voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa in zaključite spuščanje.

### Uporaba naslona za roko

Naslon za roko je lahko zložljiv, odstranljiv ali zložljiv in odstranljiv

Zasuk nazaj – ta funkcija je uporabna pri vstopu ali izstopu iz vozička.

Pritisnite sprostitveno ročico in zavrtite naslon za roko

## Uporaba koles 60 cm

Zadnja kolesa 60 cm se uporabljajo pri samostojnem gibanju (ko se poganjate sami).

Primitite obroč in potisnite v zeleno smer

## Prenos

Invalidski voziček je zasnovan za enostavno prenašanje.

Ko odstranite naslon za roke in noge, ga lahko zložite in preprosto postavite v prtljažnik avtomobila. Če to ni mogoče, postavite invalidski voziček pred zadnji sedež avtomobila tako, da bo stabilen in da ne bo mogel zdrsniti. Privežite ga z varnostnim pasom.

## VZDRŽEVANJE

Vozički podjetja Moretti so temeljito preverjeni in označeni z oznako EC po lansiranju na trg. Zaradi varnosti pacientov in uporabnikov priporočamo, da vsakih 2 leti dovolite proizvajalcu ali pooblaščenemu servisu, da preveri napravo. V primeru popravila uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Pred uporabo upoštevajte poglavje »PRED UPORABO«. Invalidski voziček Moretti ARDEA ONE zahteva malo osnovnega in občasnega vzdrževanja, spodaj so navedeni redni pregledi:  
kakovost zaviranja – mesečno  
čiščenje sedeža – po potrebi

## ČIŠČENJE

### Prevleka in podloga

Prevleka in podloga sta iz najlona. Očistite z mlačno vodo in blagim milom.

### Okvir in kovinski deli

Očistite z mlačno vodo in blagim milom. Obrišite z mehko krpo, da ne opraskate barve.

### Zavore in kolesa

Kolesa očistite z mlačno vodo in blagim milom. Posebno pozornost posvetite sušenju koles – nevarno je uporabljati invalidski voziček z mokrimi kolesi.

### Dezinfekcija

Če morate razkužiti napravo, uporabite običajno sredstvo za razkuževanje.