

# YUWELL MERILNIK GLUKOZE V KRVNI KADARKOLI



## NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

**SKU: CT-3**

# Anytime

## Sistem za neprekinjeno spremljanje glukoze

### Serija CT3

#### VODNIK ZA ZAČETEK

Deli



Applikator  
(sonda)



Oddajnik



Polnilna  
baza



Polnilni  
kabel


1 Priprava

### Korak 1 Prenesite programsko opremo

- Vključite mobilni Bluetooth
- Uporabite kamero pametnega telefona za skeniranje QR kode na paketu za prenos ali posodobitve aplikacije
- Sledite navodilom za prijavo



1 Vključite Bluetooth

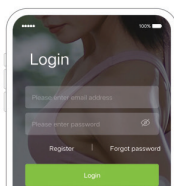

2 Prijava

### Korak 2 Napolnite oddajnik

- Za polnjenje dajte oddajnik v bazo polnjenja. Beli indikator bo utripal (prikazuje polnjenje).
- Bela luč utripa na aplikatorju, ko se napolni in modra luč se nenehno prižge, ko je polna.



Odstranite oddajnik po popolnem polnjenju


Indikator

Beli indikator utripa: polnjenje  
Modri indikator: popolnoma napoljen

2 Priključite napravo.

### Korak 1 se povežite z oddajnikom

- Izberite SN (serijsko številko) na strani "Povezava", ki ustreza oddajniku, da dokonča povezavo.

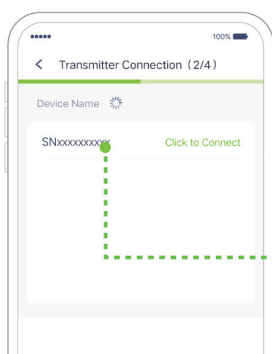

SNxxxxxxxx



### Korak 2 Povežite se s senzorjem

- Na strani aplikacije skenirajte QR kodo na ohišju palstičnega senzorja in vnesite način odštevanja.




Skenirajte QR kodo

**Korak 1**

Predlog: nošenje na trebuhu ali nadlakti

- Razkužite kožo, kamor boste namestili senzor
- Senzorja nikoli ne nanašajte večkrat na isto mesto.
- Za nanos na trebuh: aplikator se namesti 5 cm diagonalno nad popkom, na pikčasto označeno območje, prikazano na sliki, pri čemer se izognemo otiščancem, brazgotinam in rebrom.
- Za uporabo na nadlakti: aplikator se namesti na zadnjo stran nadlakti.

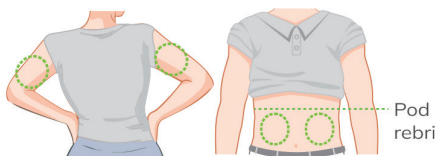

**Korak 2**

Ne odklenite pred uporabo

- Odstranite dve zaščitni foliji z oranžnega območja.

Odstranite zaščitne folije



**Korak 3**


Ne odklenite pred uporabo

- Pritisnite aplikator ob mesto vsaditve.




**Korak 4**

- Pritisnite varnostno ključavnico, da jo odklenete.

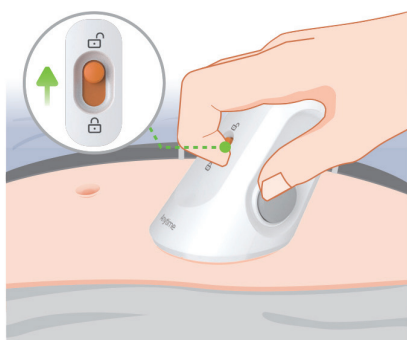

**Korak 5**

- Hkrati pritisnite gumba na obeh straneh, dokler ne zaslišite "klika".

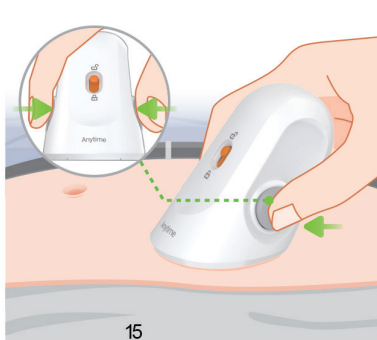

**Korak 6**

- Počasi odstranite aplikator, da dokončate vsaditev senzorja.



**Korak 1**

**! Važni koraci**

- Oddajnik pritrdite na senzor pod kotom, prikazanim na naslednji sliki.



**Korak 2**


- Oddajnik in senzor trdno pritisnite skupaj, kot je prikazano na naslednji sliki, dokler ne zaslišite »klika«.

**!** Pritisnite oddajnik nazaj, da preverite, ali je zaklenjen.


1




2

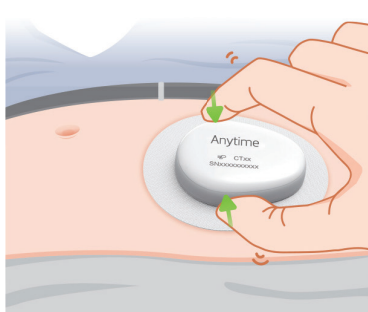

- Aplikacija začne prikazovati vrednost intersticijske glukoze po zagonu.

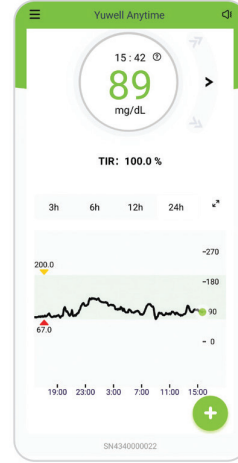

- Počasi odstranite senzor in oddajnik skupaj z mesta nošenja.
- Po odstranitvi potisnite sponko navzdol in odprite oddajnik.
- Senzor zavržite kot medicinske odpadke.

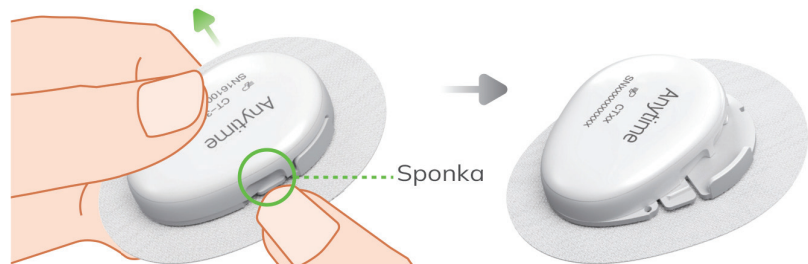

! Oddajnika pazite, da ga slučajno ne zavržete.

! Oddajnik takoj napolnite.

## GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA: .....

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: .....

V primeru reklamacij se obrnite na:  
 Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
 TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si