

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

Storitev za Slovenijo:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

OTOSKOP S KSENONSKO HALOGENSKO LUČJO

MODEL: DMV540



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

Servis za Slovenijo:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

Medicinska naprava razreda I
v skladu z direktivo 93/42 / EGS

KODA: DMV540N

- Mini otoskop s konvencionalno svetlobo.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup otoskopa DIMED DMV540N podjetja Moretti S.p.A. Njegova zasnova in kakovost zagotavljata uporabniku udobje, varnost in zanesljivost. Ta priročnik vsebuje nasvete za vašo varnost in pravilno uporabo naprave. Priporočamo, da ta priročnik z navodili preberete pred uporabo izdelka. V primeru dvomov se obrnite na prodajalca.

NAMEN UPORABE

Otoskop je medicinska naprava, ki omogoča analizo slušnega kanala. To napravo lahko uporablja samo strokovno in usposobljeno osebje.

POZOR

- Ne uporabljajte izdelka v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Moretti S.p.A. zavrača vso odgovornost za vse posledice, ki izhajajo iz nepravilne uporabe tega izdelka in nepooblaščenih sprememb ohišja izdelka.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe podatkov, vsebovanih v tem dokumentu, brez predhodnega obvestila.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Moretti S.p.A. izjavlja, pod svojo izključno odgovornostjo, da so izdelki, ki jih proizvaja in prodaja Moretti S.p.A. in ki sodijo v asortiman OTOSCOPE, skladni z veljavnimi določbami, opisanimi v Direktivi o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS. V ta namen Moretti S.p.A. jamči in na lastno odgovornost izjavlja naslednje:

1. Zadevne naprave izpolnjujejo bistvene zahteve Priloge I Direktive 93/42/EGS, kot je določeno v Prilogi VI navedene direktive in njenih nadaljnjih spremembah
2. Zadevne naprave NISO MERILNE NAPRAVE
3. Zadevne naprave NISO NAMENJENE ZA KLINIČNE RAZISKAVE
4. Zadevne naprave se prodajajo v NESTERILNI embalaži
5. Šteje se, da zadevne naprave spadajo v razred I
6. Zadevnih naprav NE uporabljajte/namestite v druge namene, razen v tistega, ki je izrecno naveden s strani Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. vodi in posreduje dokumentacijo, ki potrjuje skladnost z Direktivo 93/42/EGS, ustreznim pooblaščenim osebam, skupaj z njenimi spremembami

OPIS SPLOŠNO

DMV540N otoskop Moretti S.p.A. so običajne lahke medicinske naprave s halogensko ksenonsko žarnico. Vsebujejo 8 nastavkov za večkratno uporabo, po 2 za vsako dimenzijo (2,4 mm, 3 mm, 4 mm in 5 mm), in se uporabljajo za pregled bobnične membrane in zunanega ušesnega kanala.

OPOZORILO ZA PRAVILNO UPORABO


Za pravilno uporabo si oglejte priročnik.

- Napravo hranite stran od virov toplote
- Napravo zaščitite pred vodo, vlago, udarci, padci, neposredno sončno svetlobo, toploto in ognjem
- Ne dotikajte se leče neposredno z roko ali trdnimi predmeti
- Napravo hranite izven dosega dojenčkov in otrok
- Ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti naprave ali komponent

SESTAVLJANJE


Odvijte ročaj in vstavite dve alkalni bateriji (AA) 1,5 V. Namestite ju s pozitivnim polom obrnjenim proti glavi naprave. Ročaj ponovno privijte.

KAKO UPORABLJATI

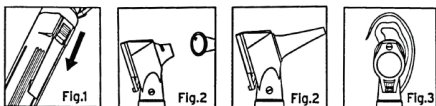

4

5

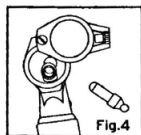

ZAMENJAVA REZERVNIH DELOV

Žarnica (Sl. 4)

- Izključite elektriko in odvijte opazovalno okence iz utora na spodnjem delu glave;
- Izvlecite staro žarnico iz kovinskega



POZOR!


Po izklopu lučke naprave počakajte vsaj 5 minut, saj se lahko segreje.

Glava

Izključite luč, odvijte glavo v nasprotni smeri urnega kazalca in jo zamenjajte z novo glavo. Privijte v smeri urnega kazalca do konca.

Ročaj

Odvijte ročico in odstranite baterije. Privijte ročico nazaj v smeri urnega kazalca do konca.

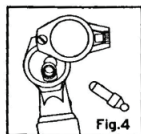

Baterije (Sl.5)

- Odvijte glavo z ročice;
- Odstranite stare AA baterije in jih zamenjajte z novimi. Pazite, da je anoda baterij usmerjena proti glavi naprave;
- Privijte glavo na ročico;

- Vključite (ali izključite) napravo s potiskom navzdol (navzgor), kot je prikazano na sliki 1;
- Izberite primeren nastavek za pacientov ušesni kanal in ga potisnite na ročico, nato nastavek privijte v smeri urnega kazalca, glejte Sl. 2. Na splošno je velikost nastavka 4 mm za odrasle in 2,4 mm za otroke;
- Postavite otoskop z nastavkom v pacientov ušesni kanal (Sl. 3) in opazujte skozi opazovalno okence s -3kratno povečavo;

VZDRŽEVANJE

DIMED naprave Moretti S.p.A. imajo oznako CE in so pregledane pred lansiranjem na trg. Priporočamo, da odstranite baterije, če naprave dalj časa ne uporabljate.

PERIODIČNI VARNOSTNI PREGLED

Naslednji varnostni pregled naj se opravi vsaj vsakih 12 mesecev s strani kvalificirane osebe, ki ima ustrezno usposobljenost, znanje in praktične izkušnje za izvedbo teh preizkusov.

- Preglejte opremo in pribor zaradi mehanskih in funkcionalnih poškodb.
- Preverite, ali naprava deluje pravilno, kot je opisano v navodilih za uporabo.



POZOR!

- Priporočljive so alkalne baterije AA;
- Zamenjajte vse baterije hkrati in ne mešajte alkalnih manganskih baterij z litijevimi baterijami, saj bo to skrajšalo življenjsko dobo svetilke;
- Ne puščajte praznih baterij v ročaju;
- Odstranite baterije iz naprave, če je ne boste

ČIŠČENJE

Površino naprave očistite s 75-odstotno raztopino alkohola vsaj enkrat na teden, pri čemer se izogibajte povečevalnemu steklu v glavi. Uporaba korozivnih polirnih sredstev je prepovedana, konice otoskopa pa lahko sterilizirate z nasičeno paro 20 minut pri 134 °C.



POZOR!

Naprave ne namakajte, ne avtoklavirajte in ne dovolite, da vanjo vstopi voda.

POGOJ ZA ODSTOP

V primeru odlaganja ne uporabljajte zabojnika za komunalne odpadke. Priporočamo, da otoskop odložite na ustrezno mesto za odlaganje in reciklažo.

ODSTRANJEVANJE BATERIJ IN ELEKTRONSKIH KOMPONENT NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE V SKLADU Z DIREKTIVO 2002/96/EC:

Ob koncu življenjske dobe izdelka ga ni dovoljeno odložiti skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Dostaviti ga je treba občinskemu centru za odstra-



6

7

njevanje odpadkov ali prodajalcu, ki nudi to storitev. Ločeno odlaganje odpadkov zmanjšuje vpliv na okolje in zdravstvene posledice nepravilnega odlaganja ter omogoča recikliranje materialov, kar pomeni prihranek energije in virov. Da bi se poudarila zahteva po ločenem odlaganju elektromedicinske opreme, je izdelek označen s simbolom prečrtanega smetnjaka.

POSTOPANJE S PRAZNI MI BATERIJAMI (DIREKTIVA 2006/66/ES):



Ta simbol označuje, da z baterijami ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Prepričajte se, da so baterije pravilno odložene; tako se preprečijo morebitni okoljski in zdravstveni vplivi nepravilnega odstranjevanja. Recikliranje pripomore k ohranjanju naravnih virov. Iztrošene baterije oddajte v ustrezen center za recikliranje. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju iztrošenih baterij ali samega izdelka se obrnite na občino, lokalno službo za odvoz odpadkov ali prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.

REZERVNI DELI IN PRIBOR

Oglejte si našo spletno stran ali katalog Moretti S.p.A., kjer lahko najdete rezervne dele in pribor

DMV510 - Komplet 4 nastavkov za večkratno uporabo

DMV511 - Nastavki za enkratno uporabo 2,75 mm - 100 kos

DMV512 - Nastavki za enkratno uporabo 4,75 mm -

8

SIMBOL

	Proizvajalec
	Simbol za označevanje električne in elektronske opreme v skladu z Direktivo 96/2002/ES. Napravo, dodatke in embalažo je treba ob koncu njihove življenjske dobe pravilno zavreči. Upošteвайте lokalne predpise ali predpise o odstranjevanju.
	Uporabljeni del tipa B
	Preberite navodila za uporabo.
	Koda izdelka
	Mesec in leto proizvodnje
	CE oznaka

GARANCIJA

Vsak izdelek Moretti je zajamčen za 2 (dve) LETI od datuma nakupa, razen spodaj navedenih omejitev. Jamstvo se ne uporablja v primeru škode, povzročene z nepravilno uporabo, zlorabo, spremembami izdelka ali katero koli drugo uporabo, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom.

Pravilna uporaba izdelka je navedena v uporabniškem

100 kos

DRV238 - Rezervna žarnica

TEHNIČNE LASTNOSTI

DIMENZIJE	24 x 37 x 165 mm
TEŽA	53,2 gr (brez baterija)
OSVETLITEV	Neposredna osvetlitev
SISTEM RAZSVETLJAVE	Konvencionalna luč s halogensko ksenonsko žarnico
LUMINISCENCA	24 lumena
POVEČANJE	3x
VELIKOST VRHA	2,4 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
ŽARNICA	2,5 V 0,7 A, 3060 K, 25 ur
BATERIJE	2 x AA 1,5 V alkalno

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

-Delovni pogoji

Temperatura: 10 °C / 35 °C

Vlažnost: 30 % - 75 %

Zračni tlak: 700 hPa - 1060 hPa

9

priročniku. Moretti S.p.A. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe zaradi nepravilnega sestavljanja / nepravilne uporabe naprave, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom.

Moretti ne jamči za svoje izdelke v primeru poškodb ali napak v naslednjih primerih: naravne nesreče, nepooblaščen vzdrževanje ali popravila, škoda, povzročena zaradi težav z električno energijo (če je predvidena), uporaba delov ali component, ki jih Moretti ne dobavlja, neupoštevanje smernic in navodil za uporabo, nepooblaščen spremembe, poškodbe med prevozom (razen pri originalni dostavi Moretti) ali neizpolnjevanje vzdrževanja naprave, kot je navedeno v priročniku.

Jamstvo ne krije sestavnih delov, ki se obrabijo, če škoda nastane zaradi običajne uporabe izdelka.

JAMSTVO ZA POLNJIVE BATERIJE

Originalne baterije in rezervne baterije so zajete z jamstvom 90 dni v obdobju 6 mesecev, glede na proizvodno napako ali kar se nanaša na zakonsko uredbo.

Če se baterije ne uporabljajo več kot 3 zaporedne mesece, je jamstvo razveljavljeno. Če se izpraznjene baterije ne uporabljajo več kot 3 zaporedne dni, se jamstvo razveljavi.

POPRAVLJANJE

-Poprava znotraj garancije

Če predmet Moretti med garancijsko dobo kaže materialne ali proizvodne napake, bo Moretti potrdil s kupcem, ali je napaka pokrita z garancijo. Moretti lahko po svoji nepreklicni presoji popravi ali zamenja predmet, preko prodajalca Moretti ali v sedežu Morettija. Stroške dela lahko Moretti zaračuna, če je popravilo pokrito z garancijo. Popravilo ali zamenjava ne podaljša garancije.

-Poprava ni pokrita z garancijo

Izdelek brez garancije se lahko pooblasti za pošiljanje šele po Morettijevem dovoljenju. Stroške dela in pošiljanja za izdelek brez garancije krije kupec ali prodajalec. Popravila so zajamčena 6 mesecev od prejema naprave.

- Nepravilna naprava

Kupec bo obveščen, če Moretti po vrnitvi in pregledu naprave ugotovi, da naprava ni okvarjena. V tem primeru bo naprava vrnjena kupcu, stroške pošiljanja krije kupec.

REZERVNI DELI

Originalni Moretti rezervni deli so zajamčeni 6 mesecev od datuma prejema.

IZJEMNE DOLOČBE

Moretti ne daje drugih izjav, garancij ali pogojev, izrečnih ali implicitnih, vključno z morebitnimi izjavami, garancijami ali pogoji prodaje, primernosti za določen

namen, nekršitve in neoviranosti, razen tistih, ki so izrecno navedeni v tej garanciji. Moretti ne zagotavlja neprekinjene in brezhibne uporabe. Trajanje morebitnih implicitnih garancij, ki jih lahko zakon naloži, je omejeno na garancijsko obdobje, v okviru zakona. Nekatere države ne dovoljujejo omejevanja implicitne garancije ali izključitve oziroma omejitve naključne škode. V takih državah se nekateri od teh izjem ali omejitev ne smejo uporabiti na uporabnika. Trenutna garancija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kot ekskluzivni uvoznik in distributer te naprave za Hrvaško jamči pravilno delovanje naprave dve leti od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA LE ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE.

12

13

Jamstvo ne vpliva na druga pravice, ki pripadajo kupcu na podlagi drugih pravnih temeljev. Jamstvo velja na ozemlju Republike Hrvaške.

Zagotavljalec jamstva se zavezuje, da bo popravo izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-pošta: prodaja@medicaldirect.si