

ALARM ZA MOČENJE POSTELJE DRI SLEEPER



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacije se obrnite na:

SKU: DRI

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: 003851/2020-504
E-pošta: prodaja@medicaldirect.si

1. SPLOŠNI OPIS

DRI sleeper je primeren za otroke, starejše od 5 let. Večina otrok preneha močiti posteljo do 5. leta starosti. Po tej starosti je lahko potrebna pomoč, da se nočno močenje ustavi. Včasih gre za zdravstveno težavo, vendar je najpogostejši vzrok nezavedna napaka pri učenju; otrok za to ni kriv. Uspešno zdravljenje z DRI sleeperjem traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Vztrajnost je ključ do uspeha. Če pride do ponovnega močenja postelje, bo običajno zadostovalo še eno kratko zdravljenje. Otrok naj bo vedno spodbujen. DRI sleeper ni igrača in ga je treba, kadar se ne uporablja, shraniti na varno mesto, da se preprečijo napake. DRI sleeper ima dva dela: alarmno enoto in detektor. Alarmna enota se pritrdi na ramo, detektor pa se vstavi v spodnje hlače, kjer zazna urin in sproži alarm.

2. POTEK TRETMAJA

1. DRI sleeper nauči uporabnika, da se prebudi, ko začne urinirati.
2. Uporabnik postane bolj občutljiv na občutek polnega mehurja in se pogosteje prebudi tik pred ali po uriniranju.
3. Uporabnik se prebudi s potrebo po uriniranju, a preden začne urinirati.
4. Uporabnik napreduje v bolj zrelo fazo, ko lahko prespi noč in se mu ni treba zbujati za uriniranje. Za podrobnejše informacije in rezultate testiranja obiščite www.dri-sleeper.com

3. NASVETI PRI UPORABI

Ko je detektor priključen v alarmno škatlico, to vključuje napravo in je pripravljena za zaznavanje vlage. Ko je detektor izključen, je naprava izklopljena. Podnevi imejte detektor izklopljen, saj tako varčujete z baterijo.

4. NAČIN UPORABE DRI SLEEPER-JA

1. Da pritrdite alarm na pižamo: prišijte ali pritrdite z varnostno zaponko ježka na pižamo na predel rame in pritrdite DRI sleeper na ježka. Najbolje je, če je vtič obrnjen navzgor. Žica od alarmne škatlice do senzorja gre pod pižamo do spodnjih hlačk.
2. Detektor se vstavi v vložek ali žepek, ki se nato vstavi v spodnje hlače.
3. Naredite majhen rez na vložku, vstavite škarje in naredite tunelček, v katerega vstavite senzor. Da zagotovite, da senzor ostane v vložku, zalepite izhod z lepilnim trakom.
4. Vadite naslednjo rutino pred spanjem: pritrdite DRI Sleeper alarmno škatlico na ramo, priključite senzor in sprožite alarm tako, da senzor potopite v vodo, izključite senzor, pretvarjajte se, da greste na stranišče, ponovite postopek -5krat.
5. Ko se sproži alarm, se otrok prebudi, izklopi alarm in gre na stranišče.
6. Vedno umijte senzor (po možnosti v kopeli s tekočim milom) po vsaki noči in ga temeljito sperite z vodo ter osušite na robčku. Če mila ni pravilno izprano, lahko povzroči sprožitev alarma. Za sterilizacijo lahko senzor operete v alkoholu. Priporočamo, da si priskrbite rezervni senzor in ga imate pripravljenega za vsak primer.
7. Nadaljujte z uporabo DRI Sleeper vsako noč, dokler ne mine 14 noči brez močenja postelje.
8. Testiranje. Vsako noč pred uporabo preizkusite delovanje naprave. V posodico s toplo vodo (najbolje posnema urin) rahlo pomosite senzor in opazujte, koliko parov črnih trakov je treba pomočiti, da se aktivira alarm. Če je potrebnih več kot 6 parov, je čas, da zamenjate senzor.

5. ISKANJE NAPAK

Ni običajno, da pride do okvare naprave. Če se alarm ne sproži, je to običajno posledica normalne obrabe senzorja. Tako kot baterije v glasbeni napravi, je treba tudi senzor občasno zamenjati.

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezplačno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si