

PRENOSNA KAD ZA KOPANJE V POSTELJI



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: EASY-BATH

KADA ZA NAPIHOVANJE Z ELEKTRIČNO ČRPALKO

Hvala, ker ste kupili izdelek Timago. Prosimo, da preberete navodila za največje zadovoljstvo pri uporabi.

LASTNOSTI

- 1 kad
- 2 ventil za odtok vode
- 3 zračni ventil
- 4 odtok



Prenosna napihljiva kad je izdelana iz trpežnega vinila. Dvojne zračne komore nudijo zaščito pred razlitjem vode in pene. Odtočni ventil omogoča hitro in varno praznjenje kadi po uporabi.

V kompletu: kad, električna črpalka, komplet za popravilo

NAMEN

Napihljiva kad omogoča umivanje telesa pacienta v ležečem položaju. Posebej je priporočljiva za notranjo uporabo pri negi nepokretnih in starejših oseb s težavami pri nagibanju glave in sklanjanju.

NAČIN UPORABE

Korak 1. Namestite pacienta v kad. Napihnite kad s pomočjo črpalke in zaprite odtočni ventil na dnu kadi. Kad se lahko napolni s toplo vodo temperature pod 50°C.

Korak 2. Po kopanju pacienta odprite odtočni ventil, da izpraznite kad skozi odtok.

Korak 3. Spustite zrak skozi ventil črpalke in prestavite pacienta. Kad osušite.

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije kadi: 190 x 90 x 22 cm

Teža kadi: 2,00 kg

Teža črpalke: 0,20 kg

Prostornina kadi: 35 litara

Poraba energije črpalke: 150 W

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Po uporabi očistite vse dele kompleta in jih pustite, da se posušijo.
- Ko kad ni v uporabi, jo zaščitite pred visoko temperaturo in vlago.
- Kompleta ne izpostavljajte neposrednemu stiku z ostrimi predmeti.
- Prilagodite temperaturo vode, da zagotovite udobje pacientu.
- Ne uporabljajte detergentov, topil ali eteričnih olj.
- Električne črpalke ne izpostavljajte neposrednemu stiku z vodo.
- Delovanje črpalke ne sme trajati več kot 20 minut, s 15-minutnim premorom. Črpalke ne uporabljajte med uporabo kadi.

OPOMBE

Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo kadi, neupoštevanje varnostnih predpisov in zlorabo.