

# ALARM ZA MOČENJE POSTELJE DRI SLEEPER



## NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si  
Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: ECLIPSE**

## 1. SPLOŠNI OPIS

DRI sleeper je primeren za otroke, starejše od 5 let. Večina otrok preneha močiti posteljo do 5. leta starosti. Po tej starosti je lahko potrebna pomoč, da se preneha nočno močenje. Včasih gre za medicinski problem, vendar je najpogostejši vzrok nezavedna napaka pri učenju; otrok za to ni kriv. Uspešno zdravljenje z DRI sleeperjem traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Vztrajnost je ključ do uspeha. Če pride do ponovnega močenja postelje, običajno zadostuje kratko ponovno zdravljenje. Otoka vedno spodbujajte. DRI sleeper ni igrača in ga je treba, ko se ne uporablja, varno shraniti, da se preprečijo napake.

Opis: DRI sleeper ima dva dela – alarmno enoto in detektor. Alarmna enota se namesti na ramo, detektor pa v spodnje perilo, da zazna urin in sproži alarm.

## 2. NAČIN UPORABE DRI SLEEPER-JA

### 1. Vklp.

DRI Sleeper Eclipse ima stikalo za vklop in izklop na strani, I = vklopljeno, O = izklopljeno. Po vklopu (položaj «I») boste slišali 5 kratkih zvočnih signalov, kar pomeni, da je naprava pripravljena za sprejem signala iz urosenzorja. Urosenzor se samodejno vklopi, ko ga odstranite iz alarmne enote, in se samodejno izklopi, ko ga vrnete nanjo.

### 2. Preverjanje delovanja urosenzorja in alarma.

Vklopite alarmno enoto – zaslišite 5 zvočnih signalov. Počakajte približno 20 sekund, da se elektronika stabilizira in začne sprejemati signale. Nato z vodo napolnite kozarec, stopite 3–2 metre stran od enote, obrnite ji hrbet in previdno, ne da bi se dotaknili črnih trakov s prsti, rahlo pomoičite urosenzor v vodo. Alarm se mora sprožiti v 3–2 sekundah. Deloval bo, dokler ga ne izklopite ročno ali se po 2 minutah samodejno izklopi za varčevanje z baterijo. Če se ponoči alarm ni sprožil, kljub temu da je postelja mokra, ponovite ta test. Če se test uspešno izvede, je najverjetneje težava v položaju urosenzorja – poskusite ga prenesti, kot je opisano kasneje. Vedno izklopite alarmno enoto in jo povežite z urosenzorjem, da varčujete baterijo.

Pomembno: Ko je bil urosenzor aktiviran z vlago, ga je treba popolnoma posušiti med senzorskimi trakovi, da se resetira. Če ni popolnoma suh, se ne bo mogel znova aktivirati.

### 3. Nastavitev glasnosti.

Glasnost alarma je privzeto nastavljena na najvišjo raven. Po želji jo lahko zmanjšate – ta nastavitveni gumb se nahaja v notranjosti baterijskega prostora, na njegovem dnu. Odprite pokrovček baterije in z majhnim izvijačem prilagodite glasnost.

### 4. Uporaba DRI Sleeper Eclipse.

Postavite alarmno enoto na mizo, stran od postelje, tako da se mora oseba popolnoma prebuditi, da jo izklopi.

I) Pomembno: najprej vklopite napravo in počakajte 5 zvočnih signalov, s čimer se izognete napačnemu vklopu zaradi morebitne preostale vlage. Če se alarm sproži, ga najprej osušite in resetirajte.

II) Urosenzor mora biti nameščen znotraj majhnega vložka z usmerjenimi senzorskimi trakovi proti uporabniku. Izrežite 25 mm široko odprtino, kot prikazano na sliki, da ustvarite tunel za urosenzor.

III) Vložek z urosenzorjem vstavite v spodnje perilo. Urosenzor mora biti na sredini vložka. Včasih morate preizkusiti položaj, da zagotovite stik z urinom.

IV) POMEMBNO: Urosenzor ima dva črna senzorska traka na vrhu, ki se morata zmočiti, da sprožita alarm. Zelo pomembno je, da je urosenzor pod vpojnim slojem vložka, saj se sicer alarm morda ne bo sprožil. Zgornji sloj vložkov je zasnovan tako, da ostane suh – urosenzor nad tem slojem ne bo učinkovit.

V) Koristno je voditi uporabo urosenzorja – vklopite alarm, postavite senzor v vložek in zlijte 2–1 žlici vode nanj. Opazujte, kako se voda vpije in kako se alarm aktivira.

VI) Ko se sproži alarm ob stiku z urinom, ga izklopite in preoblecite sebe ali otroka.

### 5. Testiranje delovanja DRI Sleeper Eclipse.

I) Da preverite alarmno enoto in urosenzor, izvedite postopek iz točke 2.

II) Urosenzor očistite z vodo in blagim milom, dobro sperite in posušite. Če je baterija šibka, bo ob sprožitvi alarma vsak četrti zvočni signal izostal – v tem primeru zamenjajte urosenzor, saj baterije ni mogoče zamenjati. Novi urosenzor je treba uskladiti z vašo enoto – glejte točko 6.

III) Baterije v alarmni enoti se lahko zamenjajo. Če je naprava izklopljena, ko ni v uporabi, baterija traja 3–2 leta. Znaki prazne baterije: tišji alarm. Baterijo preprosto odstranite in vstavite novo.

### 6. Usklajevanje novega urosenzorja ali alarmne enote.

I) Ločite urosenzor od alarmne enote. Vklpote napravo in z majhnim izvijačem ali sponko pritisnite na odprtino za usklajevanje poleg stikala za vklop/izklop.

II) Alarmna enota začne oddajati signale – «poslušaj», išče urosenzor. Ko ga zazna, se oglasi 5 zvočnih signalov – postopek je zaključen.

III) Če ga ne zazna, boste slišali en dolg signal. Ponovite postopek 6, dokler ga ne najde.

### 7. Nasveti za uporabo DRI Sleeper Eclipse.

I) Če je prišlo do močenja, alarm pa se ni sprožil, izvedite postopek 2, nato preverite točko 4 in pravilno postavite urosenzor.

II) Alarm se lahko sproži tudi ob prekomernem potenju – v tem primeru vstavite urosenzor globlje v vložek ali ga obrnite s trakovi navzdol.

III) Če ne uporabljate vložkov, lahko urosenzor vstavite med dva para spodnjic ali v prišit žep – vendar to ni zanesljivo. Urosenzor ovijte v papir, ki vpije urin in sproži alarm.

IV) Pri uporabi enkratnih plen (npr. Pampers) se alarm morda ne bo sprožil, ker zelo dobro vpijajo.

V) Vadite rutino odhoda na stranišče: vključite napravo, sprožite alarm (npr. s kovinskim predmetom), vstajanje, hoja na stranišče, simulacija uriniranja, vračanje v posteljo. Ponavljajte –4–3krat.

VI) Ljudje, ki trdno spijo, se na začetku morda ne bodo prebudili – to ne pomeni, da naprava ne deluje. Sčasoma se tudi

oni navadijo. Do takrat naj jih prebudi druga oseba. Poskrbite, da se popolnoma prebudijo in da se naslednji dan spomnijo alarma in odhoda na stranišče. Na naši spletni strani [www.DRI-Sleeper.com](http://www.DRI-Sleeper.com) so dodatna navodila za trdno speče uporabnike.

VII) Urosenzor vedno temeljito operite – najbolje s tekočim sredstvom, dobro sperite in posušite, posebej med senzorskimi trakovi. Če ostane sredstvo ali vlaga, naprava ne bo delovala pravilno.

8. Napravo uporabljajte vsako noč, dokler ne dosežete 14 zaporednih dni brez nočnega močenja.

Preprečevanje ponovitve: nekateri uporabniki lahko znova začnejo močiti posteljo. Ponovite celoten postopek od začetka. Ko dosežete 14 noči brez močenja, je en trik ta, da uporabniku daste 2 dcl vode (1 kozarec) pol ure pred spanjem. Tako se bo čez 3–2 ure verjetno sprožil alarm.

## **GARANCIJA**

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA: .....

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: .....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si