

ELEKTRIČNI TERMOFOR



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

SKU: INN-051

Uporabniški priročnik

Čestitamo ob nakupu brezžičnega električnega termoforja Innoliving INN-051. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik. Priporočamo, da priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Naprave ne uporabljajte, dokler je priključena na elektriko (faza segrevanja). Ko je segreti, jo izklopite iz elektrike – naprava je nato pripravljena za uporabo.

Pred uporabo preverite, ali je naprava poškodovana. Če sumite na poškodbo, se obrnite na pooblaščenega distributerja.

Če je naprava poškodovana, ne deluje pravilno ali je padla v vodo, je ne uporabljajte, temveč se obrnite na pooblaščen servis. Vedno izvlecite kabel tako, da primete za vtikač, ne za kabel. Ne preluknjajte tkanine izdelka in vedno pred uporabo preverite, ali iz naprave pušča tekočina. Tekočina v napravi ni primerna za pitje. Ne poskušajte zamenjati tekočine v napravi. Pred priključitvijo naprave preverite skladnost napetosti naprave z lokalno električno napetostjo. Naprave ne puščajte na mestih, kjer obstaja nevarnost padca v kad ali umivalnik. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Če naprava pade v vodo, JE NE POSKUŠAJTE IZVLEČI!

Napravo hranite stran od virov toplote, sončne svetlobe, vlage in ostrih predmetov. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem. Ne dotikajte se naprave ali kablov z mokrimi rokami. Naprave ne postavljajte na vroče ali vlažne površine, saj lahko to poškoduje izdelek. Da bi zaščitili otroke pred električnim udarom in podobnimi nesrečami, naprave nikoli ne puščajte priključene brez nadzora in jo vedno hranite zunaj dosega otrok. Osebe, ki ne občutijo toplote, in osebe s podobnimi invalidnostmi ne smejo uporabljati naprave. Napravo uporabljajte samo za namen, kot je opisan v tem priročniku. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in nevarno. Uporabljajte samo originalni pribor naprave. Naprava je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih. Napravo lahko servisira izključno pooblaščen servis.

NAČIN DELOVANJA NAPRAVE

Vzemite termofor iz vrečke in ga s priključkom obrnite navzgor ter postavite na ravno in trdno podlago. V plastični del termoforja vstavite napajalni kabel in vtikač priključite v vtičnico. Naprava vsebuje raztopino soli in vode, ki se segreje hitro in varno. Ob koncu faze segrevanja temperatura doseže približno 65–75 °C, LED-indikator se izklopi. Čas segrevanja traja približno 15 minut. Izključite kabel iz elektrike in iz naprave. Termofor je pripravljen za uporabo. INN-051 zadržuje toploto od 2 do 6 ur, odvisno od zunanje temperature. Ko se termofor ohladi, ga lahko ponovno segrejete. Po uporabi vedno shranite termofor v njegovo vrečko in ga hranite na suhem in čistem mestu, stran od virov toplote in sončne svetlobe. Vlaga lahko poškoduje napravo. Če imate izpuščaje, rane ali druge poškodbe kože oziroma težave s krvnim obtokom, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Naprava ni medicinski pripomoček in ni primerna za profesionalne medicinske tretmaje. Naprava je namenjena za domačo uporabo.

V primeru revmatičnih bolečin, bolečin menstruacij, glavobolov, bolečin v mišicah in kosteh ali katere koli druge bolezni se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave TRI (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:.....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si