

GRELNA ODEJA



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

SKU: INN-065 in INN-063

PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA BODOČO UPORABO.

Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili, še posebej varnostna opozorila, in jih upoštevajte. Ta priročnik shranite za referenco.

Če varnostna navodila niso upoštevana, lahko to povzroči okvare in garancija bo razveljavljena, proizvajalec pa ne prevzema nobene odgovornosti.

OPOZORILA

- Pred uporabo samega izdelka preverite, da izdelek ni poškodovan. V primeru poškodbe, težav pri delovanju ali če je padel v vodo, izdelka ne uporabljajte in se obrnite na prodajni servis.
- Ne puščajte plastične vrečke ali drugih delov embalaže v dosegu otrok.
- Krmilna enota in grelna odeja sta pakirani ločeno. Grelno odejo uporabljajte samo s priloženo krmilno enoto.
- Pred priključitvijo v električno omrežje preverite, ali vrednosti napetosti el. sistema ustrezajo vrednostim, navedenim na napravi.
- Grelne odeje se ne sme uporabljati prepognjene ali zmečkane.
- Izdelek je zasnovan in izdelan za uporabo kot pod-odeja (nameščena na vzmetnico pod rjuho), vsaka druga uporaba ni primerna in lahko ogrozi vašo varnost.
- Pred čiščenjem odstranite krmilno enoto.
- Ne sme se čistiti v kemični čistilnici.
- Naprave ne uporabljajte, če je vlažna ali mokra.
- Odeje se ne sme ožemati ali mečkati.
- Ne zabadate bucik, igel ali podobnih predmetov v odejo.
- Ko ni v uporabi, mora biti odeja izključena iz el. omrežja.
- Ne vlecite vtiča iz vtičnice s potegom za krmilno enoto.
- Pri uporabi na posteljah s premično letveno osnovo bodite pozorni, da se pri dviganju ali spuščanju osnove ne poškoduje napajalni kabel odeje.
- Odejo uporabljajte samo na vzmetnici kot podlago, ne nameščajte je na letve, pode ali druge trde površine.
- Ne priključujte naprave v el. omrežje, preden jo namestite na posteljo.
- Naprava ni namenjena uporabi:
 - otrokom,
 - invalidnim osebam,
 - osebam neobčutljivim na povišane temperature,
 - osebam s srčnim spodbujevalnikom ali drugim baterijsko napajanim medicinskim pripomočkom.
- Naprave ne uporabljajte hkrati z drugimi grelnimi telesi.
- Ta naprava ni namenjena medicinski uporabi v bolnišnicah.
- Predolga uporaba grelnih teles lahko povzroči opekline.
- Pred shranjevanjem naprave počakajte, da se ohladi.
- Na shranjeno napravo ne odlagajte predmetov, ki bi jo lahko deformirali.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izključite iz el. omrežja. Napake ne odpravljajte sami.
- Če pregori varnostna varovalka, je treba napravo vrniti proizvajalcu ali pooblaščenemu servisu za popravilo oz. zamenjavo.
- Napravo redno pregledujte zaradi znakov obrabe ali poškodb.
- Če opazite poškodbe na napravi ali naprava ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščen servis ali proizvajalca.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo pooblaščen servis ali proizvajalec.
- Naprava ni namenjena zunanji uporabi.

UPORABA

- Grelno odejo uporabljajte samo s priloženo krmilno enoto.
- Za povezavo krmilne enote in grelna odeje vstavite priloženi konektor (3) v vtičnico na odeji.
- Grelno odejo položite na vzmetnico tako, da je stran z vtičnico za povezavo krmilne enote obrnjena proti vzmetnici.
- Poravnajte odejo, če je potrebno, odeja ne sme biti zmečkana.

- Ne prepogibajte grelna odeja.
- Čez grelna odeja namestite rjuho in posteljo uredite na običajen način.
- Med uporabo krmilne enote ne postavljajte pod blazino ali odejo.
- Stikalo na krmilni enoti nastavite na ničlo (0) pred vklopom naprave v el. omrežje.
- Električno grelna odejo vključite eno uro pred odhodom v posteljo in izberite želeno temperaturo ogrevanja.

- Nivo 1: nizka moč ogrevanja za občutek toplote in udobja v postelji
- Nivo 2: srednja moč pri zmerno hladnem vremenu
- Nivo 3: visoka moč za intenzivno ogrevanje postelje, kadar je temperatura v prostoru zelo nizka

- Za hitrejše ogrevanje odeje izberite nivo 3.
- Pred odhodom v posteljo izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred začetkom čiščenja odklopite krmilno enoto od grelna odeje.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev ali čiščenja v kemični čistilnici, saj lahko poškodujejo električne dele v odeji in ogrozijo vašo varnost.
- Krmilne enote ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Odejo lahko perete ročno ali v pralnem stroju pri temperaturi največ 40 °C in pri najnižji hitrosti ožemanja. Priporočamo ročno pranje, ki bo podaljšalo življenjsko dobo naprave.
- Naprave nikoli ne sušite v sušilnem stroju.
- Ne ožemajte odeje z mečkanjem ali prepogibanjem, pustite jo, da se posuši na zraku v ravnem položaju brez prepogibanja.
- Ne likajte.
- Ne shranjujte je vlažne – odejo shranjujte ali znova uporabljajte šele, ko je popolnoma suha.
- Ko naprave ne uporabljate, jo pustite, da se ohladi, nato jo nežno prepognite in shranite v škatlo, v kateri je bila dostavljena.
- Ne pritiskajte odeje in ne odlagajte nanjo težkih predmetov, ki bi jo lahko deformirali ali poškodovali.

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:.....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si