

ELEKTRIČNA GRELNA ODEJA



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

SKU: INN-766

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA BODOČO UPORABO.

Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik z navodili, še posebej varnostna opozorila, in se jih dosledno držite. Ta priročnik shranite za referenco. Če varnostna navodila niso upoštevana, lahko pride do okvar, garancija bo razveljavljena, proizvajalec pa ne prevzema nobene odgovornosti.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Po odstranitvi embalaže preverite, ali je izdelek cel. Če opazite vidne poškodbe, ga ne uporabljajte, temveč vrnite proizvajalcu ali prodajalcu.
- Plastično vrečko in drug embalažni material hranite izven dosega otrok.
- Iz varnostnih razlogov električne pododeje in krmilne enote ni dovoljeno odpirati ali razstavljati.
- Električno pododejo uporabljajte izključno s priloženo krmilno enoto.
- Pred priključitvijo preverite, ali napetost, navedena na oznaki, ustreza omrežni napetosti.
- Električne pododeje ne uporabljajte prepognjene ali zmečkane.
- Izdelek je namenjen domači uporabi kot električna pododeja. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in nevarno.
- Pred pranjem odklopite krmilno enoto.
- Ne čistite kemično.
- Ne uporabljajte, če je električna pododeja ali kateri koli njen del vlažen ali moker.
- Ne ožemajte in ne zvijajte.
- Ne zabadajte igel ali podobnih predmetov v električno pododejo.
- Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz vtičnice.
- Nikoli ne vlecite kabla ali krmilne enote pri izključevanju iz vtičnice.
- Pododeja ni namenjena medicinski uporabi v bolnišnicah.
- Napravo uporabljajte samo na vzmetnici. Ne uporabljajte je na trdih površinah (brez vzmetnice, na dnu postelje, letvicah, tleh itd.).
- Izključite napravo iz vtičnice, preden ležete. Uporabnik ne sme zaspiti, dokler je naprava vključena.
- Ne uporabljajte pri osebah z invalidnostjo, otrocih, osebah neobčutljivih na toploto ter osebah s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi medicinskimi baterijskimi napravami.
- Dolgotrajna uporaba pri visoki temperaturi lahko povzroči opekline kože.
- Ne uporabljajte skupaj z drugimi grelniki.
- Naprave se ne sme uporabljati na nastavljenih posteljah, saj se pododeja ali kabel lahko zatakneti.
- Pred shranjevanjem pustite, da se izdelek ohladi.
- Ne prepogibajte in/ali deformirajte električne pododeje s polaganjem predmetov nanjo med shranjevanjem.
- Ne uporabljajte na prostem.
- V primeru okvare ali nepravilnega delovanja izključite iz vtičnice. Ne popravljajte sami – takoj kontaktirajte pooblaščen servis.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta dalje ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj, pod nadzorom ali če so dobile jasna navodila za varno uporabo in razumejo nevarnosti.
- Izdelek ni igrača. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo. Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Če zaščitna varovalka pregori, je treba napravo vrniti proizvajalcu ali njegovemu zastopniku.
- Redno pregledujte napravo zaradi znakov obrabe ali poškodb. Če opazite poškodbe ali naprava ne deluje pravilno, kontaktirajte pooblaščen servis. Če je kabel ali vtičnik poškodovan, izdelka ne uporabljajte – obrnite se na pooblaščen servis ali proizvajalca.
- Uporabnik ne sme zaspiti, dokler je naprava vključena in priključena na omrežje.
- **OPOZORILO:** Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Otroci, mlajši od 3 let, ga ne smejo uporabljati zaradi nezmožnosti reakcije na pregrevanje.
- Električne pododeje ne smejo uporabljati otroci, razen če je starš/skrbnik predhodno nastavil krmilno enoto ali če otrok ni dovolj poučen za varno uporabo.
- Izdelek ni namenjen osebam, ki so neobčutljive na toploto ali se ne morejo ustrezno zaščititi pred pregrevanjem.
- Izdelek ni namenjen medicinski uporabi v bolnišnicah.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odrasle osebe.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis, da se izognete tveganju.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 3 do 8 let, samo pod nadzorom in če je krmilna enota nastavljena na minimalno temperaturo.
- Kabel in krmilna enota lahko predstavljata nevarnost zapletanja, zadušitve ali spotikanja, če nista pravilno pritrjena. Uporabnik mora zagotoviti, da je odvečni kabel ustrezno fiksiran.



NE UPORABLJAJTE ELEKTRIČNE
ODEJE, KI JE PREPOGNJENA
ALI ZMEČKANA



NE ZABADAJTE PALIC
ALI IGEL V ODEJO

Kako uporabljati:

Ta izdelek je namenjen uporabi kot odeja, zato mora biti v neposrednem stiku z uporabnikom ali preko rjuhe. Izdelka ne uporabljajte kot »PODODEJO« ali »pod odejo«. Priključite priloženi upravljalni kabel na pokrov (pokrov ima vtikač, priključen na krmilno enoto) in preverite, ali je popolnoma priključen.

KAKO UPORABLJATI ELEKTRIČNO ODEJO

Ne postavljajte regulatorja pod vzglavnik ali pod odejo med uporabo.

Nastavite stikalo za vklop na položaj 0 in vstavite vtikač v vtičnico. Izberite najvišjo raven temperature. Po 15 minutah nastavite temperaturo na želeno raven.

Priporočljivo je, da vključite grelno odejo eno uro pred spanjem in prestavite stikalo na želeno raven temperature.




Izbrana temperatura je odvisna od temperature prostora in osebnih preferenc. Na primer:

- Raven 1: nizka moč za rahlo ogrevanje,
- Raven 2: srednja moč,
- Raven 3: visoka moč za ogrevanje postelje, kadar je prostor še posebej hladen.

Za hitrejše ogrevanje postelje izberite raven 3.

Preden odidete v posteljo, izklopite napravo in jo izključite iz električne vtičnice.

Temperatura, ki jo zazna roka, se razlikuje od temperature, ki jo občuti telo med ležanjem; na drugih delih telesa je lahko občutno topleje. Temperatura, ki jo je možno zaznati na odeji po segrevanju, je med 34°–38°. Razlike v zaznani temperaturi so lahko posledica posebnih okoliščin okolja, v katerem je odeja uporabljena.

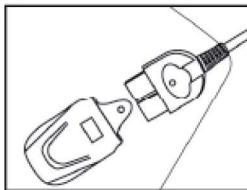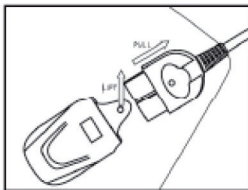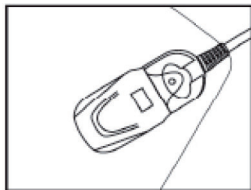

Izključitev priključka



Za izključitev kabla izvlecite vtikač. Nikoli ne vlecite kabla.

Po uporabi:

Preverite, ali je regulator v položaju 0, ko električna odeja ni v uporabi, in izvlecite vtikač iz vtičnice. Če električne odeje dlje časa ne boste uporabljali, jo shranite na hladnem in suhem mestu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred pranjem ali čiščenjem naprave izključite krmilno enoto iz električne prevleke.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odrasle osebe.

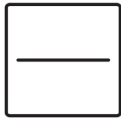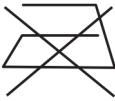	Ne čistite kemično in ne uporabljajte kemičnih topil, saj lahko poškodujejo električno odejo in ogrozijo varnost naprave.		Ne beliti.
	Električno odejo perite ročno ali v pralnem stroju pri največ 30 °C z nizko stopnjo delovanja in vrtenja. Priporoča se ročno pranje za podaljšanje življenjske dobe izdelka. Po pranju električno odejo obesite na sušilno stojalo, da se posuši. Ne uporabljajte ščipalk, saj lahko poškodujejo grelne elemente.		Ne mečkajte, ne ožemajte in ne zvijajte električne odeje.
• Krmilne enote ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo.			
	Nikoli ne sušite v sušilnem stroju.		Suho ležanje
	Ne likati.		Tega izdelka ne smejo uporabljati majhni otroci (0–3 leta).
• Ne priključujte naprave v vtičnico, da bi jo hitreje posušili. • Ne puščajte naprave sušiti na soncu. • Ne uporabljajte sušilnika za lase za sušenje naprave. • Pustite, da se električna odeja posuši po naravni poti. • Ne uporabljajte, če je električna odeja ali kateri koli njen del vlažen ali moker.			

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave TRI (3) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:.....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si