

DIGITALNI ALKOTESTER



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

SKU: INN-991


Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

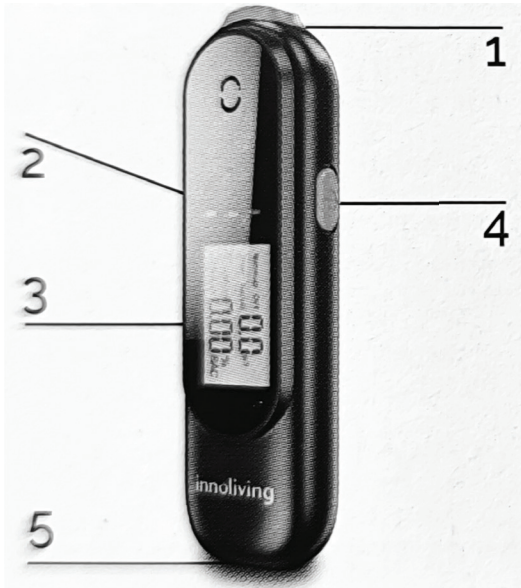

1. ustnik
2. svetlobni indikatorji
3. zaslon
4. stikalo
5. USB izhod

Tester vam hkrati z uporabo testa posreduje informacije za določanje ravni alkohola v krvi. Koncentracija alkohola v krvi se sčasoma spreminja in na meritev lahko vplivajo okoljski pogoji. Ta izdelek je namenjen le kot referenca za spodbujanje odgovorne in varne vožnje. Zagotavlja le okvirno meritev in ne nadomešča ali izključuje morebitnih testov, ki jih izvajajo pristojni organi in ki imajo lahko drugačne odčitke. Odčitki testerja nimajo pravne vrednosti in ne odvezujejo nobene individualne odgovornosti. Nepravilno shranjevanje izdelka in/ali nepravilna uporaba izdelka lahko vplivata na natančnost meritve. Ne zanašajte se na to kot edino podlago za ugotavljanje stanja opitosti ali ali je varno voziti vozilo, upravljati opremo ali se ukvarjati z nevarnimi dejavnostmi. Innoliving Spa ne odgovarja za nepravilno uporabo tega izdelka iz kakršnega koli razloga. Pred uporabo preverite, ali je naprava nepoškodovana in brez vidnih poškodb. V primeru dvoma izdelka ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisni center. Po uporabi izdelek vedno shranjujte stran od virov toplote, sončne svetlobe, vlage, ostrih predmetov ali podobnega. V bližini testerja ne uporabljajte alkoholnih snovi, kot so barve ali insekticidi. Za čiščenje testerja ne uporabljajte kemikalij. Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, saj lahko s tem poškodujete senzor. Izdelka ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo, ampak se vedno obrnite na pooblaščen servisni center.

Določene snovi, kot so ustna vodica in nekatera zdravila, ki vsebujejo etanol, lahko vplivajo na rezultat. Alkohol se skozi prebavni sistem absorbira v krvni obtok približno 20 minut, zato je priporočljivo meriti 20 minut po zaužitju alkoholnih pijač. Če meritev opravite takoj po pitju, lahko rezultati odražajo koncentracijo alkohola v pijači in ne dejanske koncentracije v krvi.

Kadilcem svetujemo, da po kajenju počakajo vsaj 5 minut, preden začnejo meriti s to napravo. Za natančnejše rezultate meritev mora biti interval med dvema zaporednima meritvama daljši od 3 minut. Meritve ponovite 2- ali 3-krat, da dobite natančnejši rezultat.

OPOMBA: Če se test izvaja s prazno baterijo, se lahko vrednost testa razlikuje od dejanske vrednosti. Ko je baterija skoraj prazna, se na zaslonu naprave prikaže »L« in naprava zapiska, da je treba baterijo napolniti. Med polnjenjem naprave indikatorska lučka sveti rdeče; ko je naprava popolnoma napolnjena, se rdeča lučka ugasne. Po popolnem polnjenju lahko naprava opravi približno 200 meritev. Vgrajene baterije ni mogoče zamenjati. Ne poskušajte je odstraniti. Tekočine, ki sestavljajo baterijo, so zelo agresivne. V primeru kakršne koli poškodbe naprave, ki povzroči puščanje tekočine iz baterije, se izdelka ne dotikajte brez

ustrezne zaščite za kožo in oči. Ne mečite je v ogenj, saj obstaja nevarnost požara in eksplozije. Napravo takoj prenehajte uporabljati, če opazite oteklino, puščanje ali druge nepravilnosti.

OPOZORILO: Vožnja pod vplivom alkohola je kaznivo dejanje za vožnjo vozila z višjo vsebnostjo alkohola v krvi, kot jo dovoljuje zakon. V Italiji je dovoljena vsebnost alkohola v krvi 0,50 g/l. Člen 186 italijanskega cestnoprometnega zakonika ureja vožnjo pod vplivom alkohola in jo razlikuje glede na vsebnost alkohola v krvi, vrsto voznika in druge okoliščine.

Merilno območje: 0,00–0,19 % BAC (0,0–1,9 g/l)

Območje delovanja: -5 °C~C45 °C

Območje temperature shranjevanja: -20 °C~50 °C

KAKO UPORABLJATI ALKOHOLNI TESTER

Izdelki delujejo z vgrajeno litijevo baterijo s kapaciteto 120 mAh 3,7 V, ki se polni prek priloženega kabla USB.

OGREVANJE

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi. Ko se naprava vklopi, boste zaslišali pisk, zaslon je VKLOPLJEN.

2. Na zaslonu se prikaže beseda »WARM-UP«, naprava začne odštrevati 10 sekund do predgrevanja. Počakajte, da se predgrevanje konča.

OPOMBA:

Ker površina senzorja oksidira, če testa dlje časa ne uporabljate, mora uporabnik, ko testerja prvič vzamete iz embalaže ali če testerja dlje časa ne uporabljate, izdelek čim večkrat ogreti, preden izvede test alkohola.

MERJENJE

1. Ob koncu predgrevanja naprava s pihanjem preide v fazo merjenja, na zaslonu se prikaže beseda »PIHANJE« in začne se odštevanje od 10 do 0.

2. Med odštevanjem pihnite v dovod zraka. Ko naprava zazna plin, se začne 3-sekundno odštevanje in zvočni signal bo signaliziral konec pihanja.

3. Rezultat odčitajte neposredno na zaslonu izdelka.

4. Če je zaznana koncentracija alkohola 0,00 % BAC (ali 0,0 g/l), to pomeni, da alkohol ni bil zaznan in LED indikator se obarva zeleno.

5. Če je rezultat večji od 0,01 % BAC (0,1 g/l), vendar manjši od 0,04 % BAC (0,4 g/l), se na zaslonu prikaže »OPOZORILO« in LED indikator se obarva rumeno, skupaj z zvočnim signalom.

6. Če je rezultat večji od 0,05 % BAC (0,5 g/l), se na zaslonu prikaže »NEVARNO« in LED-indikator se obarva rdeče, skupaj s zvočnim signalom.

SIMBOLI IN LED INDIKATORJI OGREVANJE: po vklopu naprave se na zaslonu prikaže beseda »HEATING« (ogretje), ki označuje fazo predgrevanja. BLOWING (pihanje): ko je predgretje končano, se na zaslonu prikaže »BLOWING« (pihanje), da se začne vpihovati zrak v dovod zraka.

REZULTAT: ko se prikaže izmerjena vrednost, se na zaslonu hkrati prikažeta beseda »REZULTAT« in ustrezna izmerjena vrednost v g/l ter %BAC (vsebnost v krvi).

IZKLOP: 10 sekund po zaznani vrednosti se prikaže »OFF«, kar signalizira samodejni izklop.

Odvisno od zaznane vrednosti se lučka obarva drugače:

Zelena: rezultat nižji od 0,1 g/L

Rumena: rezultat od 0,1 g/l do 0,4 g/L

Rdeča: rezultat višji od 0,5 g/L

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:.....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si