

VARNOSTNA OGRAJA, NAMEŠČENA NA STRANIŠČU



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

SKU: JMC5300KD

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

VARNOSTNA OGRAJA, KI SE NAMESTI NA STRANIŠČE

Hvala, ker ste kupili izdelek Timago. Prosimo vas, da preberete navodila za največje zadovoljstvo pri uporabi.

LASTNOSTI


Varnostna ograja WC-ja je izdelana iz ultra lahkega anodiziranega aluminija. Nastavljiva je po višini in širini, da zadosti potrebam uporabnika.

Set vključuje:

- Levi okvir
- Desni okvir
- Priključek

Elementi stola komode:

- a. naslon za roko
- b. nastavitev širine
- c. priključek
- d. nastavitev višine – zaklepni zatič
- e. protidrski nastavki

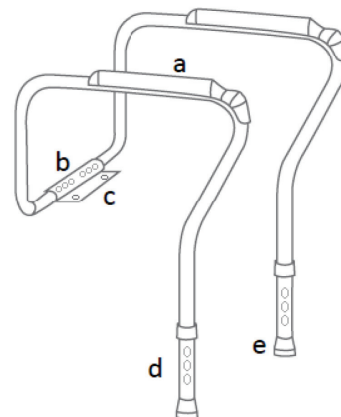

UPORABA

Varnostna ograja za WC je pomožno pomagalo, ki uporabniku pomaga pri opravljanju fizioloških potreb. Varnostna ograja se priporoča osebam z disfunkcijo in tistim, ki so izgubili sposobnost samostojnega sedenja in vstajanja. Zahvaljujoč nastavitvi višine in širine se lahko okvir prilagodi velikosti WC školjke.

NASTAVITEV

- Najprej odstranite WC desko; odvijte pritrditvene vijake WC školjke.
- Montažni element varnostne ograje postavite tako, da ustreza montažnim odprtinam WC školjke.
- Namestite okvir WC školjke.
- Za nastavitev širine pritisnite kovinski zatič na montažnem elementu, izberite ustrezno širino in zaklenite položaj cevi eno glede na drugo.
- Za nastavitev višine pritisnite kovinski zatič na nogici, izberite ustrezno višino in zaklenite položaj cevi eno glede na drugo.
- Namestite WC desko.

Opomba! Zatiči morajo biti nameščeni na isti ravni na vsaki nogi. Noge morajo stati stabilno na tleh.

TEHNIČNI PODATKI

Skupna širina: 53-63 cm

Skupna globina: 44 cm

Višina: 64-74 cm

Dimenzije sedeža: 47 cm x 42 cm

Teža: 0,4 kg

Največja nosilnost: 100 kg

Barva okvirja: srebrna

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Varnostno ograjo čistite samo z vodo in blagimi detergenti. Temeljito osušite.
- **Ne uporabljajte:** močnih detergentov, abrazivnih sredstev, belil, bencina ali topil (lahko povzročijo poškodbe ogrodja, vidne napake in posledično – izgubo garancije).
- Priporočljivo je redno preverjati gumijasti nastavek. Takoj zamenjajte obrabljen nastavek.

OPOMBE

Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo varnostne ograje, neupoštevanje varnostnih predpisov in zlorabo.