

KAD ZA UMIVANJE LAS



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: KADICA

1. UVOD

PREVEDI MI NA SLOVENSKI I NE MIJENJAJ SINTAKSE NITI FORMATIRAJ:

2. IZVEDBA

Prenosni napihljiv bazen za umivanje glave s PVC odprtino za odtok je mehak in udoben za uporabo. Dvojne zračne komore ščitijo pred razlitjem vode in pene.

Set vsebuje:

- Bazen
- Rezervoar za vodo
- Tuš
- Odtok cev
- Črpalka
- Držalo za rezervoar

3. UPORABA

Komplet za umivanje glave omogoča umivanje pacientove glave v ležečem položaju. Priporoča se zlasti za domačo uporabo pri negi nepokretnih oseb ter starejših oseb, ki težko nagnejo glavo in se sklonijo.

4. KAKO UPORABLJATI

- Najprej napihnite bazen z zrakom s pomočjo črpalke, nato zaprite odtočni ventil, ki se nahaja na dnu bazena. Bazen lahko napolnite s toplo vodo pod 50 °C.
- Povežite rezervoar za vodo s tušem
- Rezervoar je treba napolniti s toplo vodo pri temperaturi, ki ne presega 50 °C. Z držalom za rezervoar lahko rezervoar obesite na stojalo ali steno.
- Pripravite vedro, nato vanj vstavite odtočno cev. Da zagotovite pravilen odtok vode, pazite, da cev ni pregibana.
- Položite pacientovo glavo v izrez za vrat, nato odprite ventil za tuširanje, da nastavite pretok vode.
- Po umivanju glave odprite odtočni ventil, da voda skozi odtočno cev odteče v vedro.