

INHALATOR ZA DOJENČKE, OTROKE IN ODRASLE



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

SKU: LTK215

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana


Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

KLIPNI KOMPRESORSKI INHALATOR

- 1 prozoren ovitek
- 2 Napajalni kabel
- 3 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
- 4 Prostor za zračni filter
- 5 Razpršilnik FASTERJET
- 6 Cev
- 7 Ustnik
- 8 Obrazna maska za odrasle
- 9 Dovod cevi
- 10 Dovod zraka

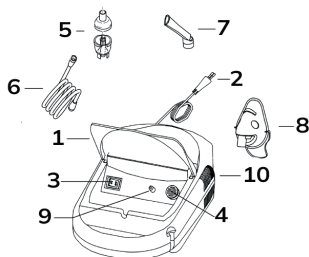

Uvod

Ta inhalator je visokokakovostna naprava za inhalacijsko terapijo pri astmi, kroničnem bronhitisu in drugih respiratornih boleznih. Naprava ustvarja aerosole s spremenljivimi lastnostmi, da se prilagodi bolnikovi respiratorni patologiji, ter ustvarja delce zdravilne megle, ki so dovolj majhni, da dosežejo najgloblje predele pljuč in imajo največji učinek. Upravljanje in uporaba naprave sta zelo enostavna. Za inhalacijsko terapijo se lahko uporabljajo vsa običajna tekoča zdravila. Prosimo, da pazorno preberete ta navodila, da boste razumeli vse funkcije in varnostne informacije. Želimo si, da boste s svojim izdelkom zadovoljni. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na svojega zdravnika.

POMEMBNA OPOZORILA

To napravo je dovoljeno uporabljati le za namene, opisane v teh navodilih. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. Naprava ni primerna za anestezijo in pljučno ventilacijo. Uporabljajte jo le z originalnimi dodatki, prikazanimi v teh navodilih. Ne uporabljajte naprave, če sumite, da je poškodovana, ali če opazite kaj nenavad-

nega. Naprave nikoli ne odpirajte. Vsebuje občutljive komponente in z njo je treba ravnati previdno. Upoštevajte pogoje shranjevanja in delovanja, opisane v poglavju "Tehnične specifikacije". Zaščitite jo pred vodo, vlago, ekstremnimi temperaturami, udarci, padci, onesnaženjem, prahom, neposredno sončno svetlobo, toploto in mrazom. Uporabljajte le zdravila, ki vam jih je predpisal zdravnik, in sledite zdravnikovim navodilom glede odmerjanja, trajanja in pogostosti terapije.

Vso dodatno opremo naj uporablja le ena oseba. Nikoli ne nagibajte inhalatorja nad 60°.

– Naprava ni zaščiten pred tekočino.

– Zaradi svoje dolžine lahko napajalni kabel in cev predstavljata nevarnost zadušitve.

Poskrbite, da otroci naprave ne uporabljajo brez nadzora – nekateri deli so dovolj majhni, da jih lahko pogoltnejo.

Uporaba inhalatorja ni nadomestilo za posvet z zdravnikom.

PRIPRAVA IN UPORABA

Pred prvo uporabo naprave priporočamo, da jo očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in razkuževanje".

1. Sestavite razpršilni komplet 12. Preverite, ali so vsi deli popolni.

2. Napolnite čašico razpršilnika z inhalacijsko raztopino po navodilih zdravnika. Pazite, da ne presežete maksimalne količine.

3. Povežite razpršilnik s cevjo za zrak 6 na kompresor 1 in priključite napajalni kabel 2 v vtičnico.

4. Stikalo ON/OFF 3 preklopite v položaj "I" za vklop naprave in vstavite ustnik 7 v usta ali uporabite eno izmed obraznih mask na usta in nos.

– Ustnik omogoča boljše dostavo zdravila v pljuča.

– Izberite med ustnikom 7, nosnim nastavkom 10, masko za odrasle 8 ali otroško masko 9 in pazite, da popolnoma prekrije področje ust in nosu.

5. Med terapijo mirno vdihujte in izdihujte. Sedežite sproščeno z vzravnanim zgornjim delom telesa. Med vdihovanjem ne ležite. Prenehajte z vdihovanjem, če se počutite slabo.

6. Po koncu obdobja vdihavanja, ki ga je priporočil zdravnik, preklopite stikalo ON/OFF 3 v položaj "O" za izklop naprave in jo izključite iz vtičnice.

7. Ispraznite preostalo zdravilo iz razpršilnika in očistite napravo, kot je opisano v

poglavju "Čiščenje in razkuževanje".

FASTERJET RAZPRŠILNIK

Naprava za aerosolno terapijo je opremljena z inovativnim razpršilnikom Fasterjet z ventilskim sistemom za izboljšano dihanje. To omogoča dostavo natančne količine zdravila v dihala pacienta. Ventil nadzoruje pretok zdravila med vdihom in tako zmanjšuje izgubo zdravila med izdihom. Fasterjet povečuje količino inhaliranega zdravila. Fasterjet lahko učinkovito razprši vsa zdravila za inhalacijsko terapijo. Sinhronizirano delovanje razpršilnika je mogoče le z uporabo ustnika z ekspiracijskim ventilom. Za povečanje hitrosti razprševanja se priporoča odstranitev inhalacijskega ventila (modri pokrov čašice), ko se uporablja maska.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Po vsaki uporabi temeljito očistite vse komponente, da odstranite ostanke zdravil in morebitne nečistoče. Kompresor 1 in cev za zrak 6 očistite s čisto, vlažno krpo.

Vedno si dobro umijte roke pred čiščenjem in razkuževanjem dodatkov. Kompresorja ne izpostavljajte vodi ali vročini.

Cev zamenjajte pri vsakem novem pacientu ali v primeru umazanosti.

Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja.

Čiščenje z vodo

Vse dele razpršilnika (razen zračne cevi) operite pod toplo tekočo vodo (maks. 60 °C) približno 5 minut, po potrebi dodajte majhno količino detergenta in upoštevajte navodila proizvajalca detergenta glede odmerjanja in uporabe. Temeljito izperite, da odstranite vse ostanke, in pustite, da se posušijo.

Razkuževanje

Vse komponente razpršilnika (razen cevi) se lahko razkužijo s kemičnimi razkužili, pri čemer upoštevajte navodila proizvajalca razkužila glede odmerjanja in uporabe. Razkužila so običajno na voljo v lekarnah.

Sterilizacija s paro

Vse komponente razpršilnika (razen cevi za zrak in mask) je mogoče sterilizirati s paro pri 121 °C (20 min.) ali 134 °C (7 min.). Po sterilizaciji vedno ohladite vse komponente na sobno temperaturo pred nadaljnjo uporabo.

Ne ponavljajte sterilizacijskega cikla, dokler so komponente še vroče.

VZDRŽEVANJE, NEGA IN SERVIS

Vse rezervne dele naročite pri svojem farmacevtu.

Priporočljivo je, da razpršilnik zamenjate po približno 100 do 120 uporabah pri enem pacientu ali po približno 20 sterilizacijskih ciklih. Redno preverjajte filter glede čistoče in ga zamenjajte, če je umazan ali najpozneje po 3 mesecih uporabe. Z napravo so priloženi rezervni filtri. Za zamenjavo filtra odprite predel za zračni filter 4 in zamenjajte filter 11.

NAPAKE IN REŠITVE

Naprave ni mogoče vklopiti

Preverite, ali je napajalni kabel 2 pravilno priključen v vtičnico. Prepričajte se, da je stikalo ON/OFF 3 v položaju "I".

Razpršilnik deluje slabo ali sploh ne deluje

Preverite, ali je zračna cev 6 pravilno priključena na obeh koncih. Preverite, da cev ni stisnjena, upognjena, umazana ali zamašena. Po potrebi jo zamenjajte z novo. Prepričajte se, da je razpršilnik 5 pravilno sestavljen 12. Preverite, ali so dodana potrebna zdravila.

TEHNIČNI PODATKI

Batni elektrokompresor
Napetost: 230V - 50Hz
Dimenzije: 310 x 180 x 105 mm
Teža: 1,2 kg pribl.
Tlak: 500 ~ 1060hPa
Pretok zraka: 6-10 l/min
Raven hrupa: 65 dBA (EN13544-1)
Hitrost: ≥ 0,2 ml/min
Kapaciteta razpršilnika: 6 ml
MMAD: 2,52±0,89 µm

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave 3 LETA od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave.

TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljevalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

V primeru reklamacij se obrnite na:
Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si