

INFUZIJSKI STOJALO



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

SKU: MI432

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

NAMEN

Stojalo za infuzijo SKEMAFORM je pripomoček za medicinske in zdravstvene dejavnosti med dajanjem intravenskih tekočin pacientu.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Za pravilno uporabo naprave glejte ta priročnik.
- Za pravilno uporabo naprave se obrnite na svojega zdravnika ali terapevta.
- Življenjska doba pripomočka je določena z obrabo nepopravljivih in/ali zamenljivih delov.
- Vedno bodite previdni v bližini otrok.

VZDRŽEVANJE

Stojalo za infuzijo je bilo skrbno pregledano in nosi oznako CE, ko je dano na trg. V primeru popravil je treba uporabiti le originalne nadomestne dele in dodatke.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Čiščenje




Uporabljajte samo vlažno krpo in nevtralno milo. Nato dobro posušite pred uporabo.

Razkuževanje

Če je potrebno razkužiti izdelek, uporabite običajen nevtralni razkuževalni detergent.

SESTAVLJANJE

1. Vstavite kolesčke (rif.A) in spodnji del osnove (rif.B), dokler ne zaslišite »klik«. (Sl.4)
2. Vstavite priključek za steber (rif.C) v zgornjo odprtino osnove. (Sl.4)
3. Vstavite steber (rif.D) v priključek (rif.C). (Sl.4)
4. Blokirate steber z vijakom (rif.F) in njegovim podložnim obročem (rif.E). (Sl.4)
5. Privijte vijak. (Sl.4)
6. Zdaj je infuzijsko stojalo pripravljeno za uporabo.

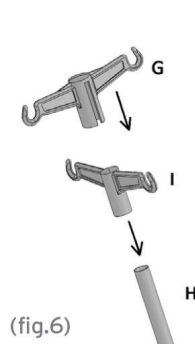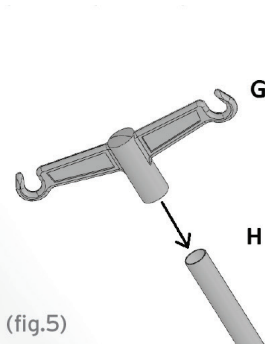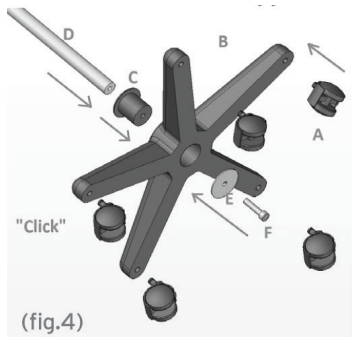

SPLOŠNI OPIS



Seznam delov:

- A. Osnovni kolesčki (5 kos)
- B. Osnova (1 kos)
- C. Spoj za steber (1 kos)
- D. Raztegljiv steber, spodnji del (1 kos)
- E. Plastični podložni obroč (1 kos)
- F. Vijak s podložnim obročem za steber (1 kos)
- G. Moška plastična kljuka (1 kos)
- H. Raztegljiv steber, zgornji del (1 kos)