

# INFRARDEČA SVETILKA



## NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

**SKU: MM3000**

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: [prodaja@medicaldirect.si](mailto:prodaja@medicaldirect.si)

Spletna stran: [www.medicaldirect.si](http://www.medicaldirect.si)

## Navodila za uporabo infrardeča svetilka Model MM3000

Hvala, ker ste kupili izdelek znamke Momert. Upamo, da boste z našim izdelkom zadovoljni skozi celotno obdobje njegove uporabe. Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite celoten priročnik za uporabo. Shranite ta priročnik na varno mesto za prihodnjo uporabo. Preverite, ali so tudi druge osebe, ki bodo uporabljale izdelek, seznanjene s temi navodili.

### TEHNIČNI PODATKI:

- Napetost: 230 V / 50 Hz
- Moč: 100 W

### UPORABA:

Ta infrardeča svetilka je namenjena izključno obsevanju človeškega telesa. Infrardeče sevanje v območju 780 – 1400 nm ustvarja toploto, ki se prenaša na človeško telo. Prekrvavitve se poveča na obsevanem območju in hitrost metabolizma se poveča v ogrevanem delu telesa. Infrardeče sevanje spodbuja telo k zdravljenju, zato se uporablja na določenih delih telesa. Toplota spodbuja boljše prekrvavitve krvi in limfne tekočine. Ti tekočini hitreje odstranjujeta presnovne in morebitne toksične snovi ter povečujeta oskrbo s kisikom.

Infrardeča svetloba se lahko uporablja kot dodatna terapija pri zdravljenju bolezni ušes, nosu in grla ter pomaga pri negi in lepoti obraza, še posebej pri nečisti koži.

Pred uporabo se posvetujte z osebnim zdravnikom, ali je ta tretma primeren za vas z medicinskega vidika.

Odstranite ves embalažni material. Preverite, ali je infrardeča žarnica pravilno privita. Napravo postavite na varno in ravno površino. Preverite, ali je kabel poškodovan. Kabel nikoli ne sme priti v stik z vročo električno žarnico. Razdalja med tretiranim delom telesa in infrardečo svetilko ne sme biti manjša od 60 cm. Med obsevanjem vedno zaprite oči! Priporočen čas tretmaja je največ 12 minut. Svetilko priključite na napajanje le med uporabo. Po koncu uporabe jo izključite iz elektrike in pustite, da se ohladi. Za začetek priporočamo krajše obsevanje. Vendar lahko nekatere osebe pokažejo preobčutljivost kože (npr. močna rdečina, mehurčki, srbenje, močno znojenje) ali alergijsko reakcijo na toplotno sevanje, tudi če je svetilka uporabljena pravilno. Redno preverjajte stanje kože na obsevanem mestu. Takoj prenehajte z obsevanjem, če se pojavijo znaki preobčutljivosti ali alergijske reakcije, in obiščite zdravnika.

### Opozorilo!

Izdelek ni namenjen osebam z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebam brez izkušenj ali znanja o uporabi naprave (vključno z otroki). Uporablja se lahko le pod nadzorom in z navodili osebe, ki zna uporabljati napravo in je odgovorna za zdravje uporabnika. Če izdelek uporabljajo otroci, je nujen nadzor odrasle osebe.

### ČIŠČENJE / MENJAVA INFRARDEČE ŽARNICE:

Pred vsakim čiščenjem in menjavo infrardeče žarnice izklopite napravo, izključite jo iz elektrike in počakajte, da se ohladi.

Napravo čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

Voda ne sme priti v notranjost naprave. Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.

Pri zamenjavi uporabite le originalne infrardeče žarnice.

Žarnice niso vključene v garancijo!

### Pomembno!

Shrani za nadaljnjo uporabo:

Podrobno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo drugim uporabnikom.

Ohišje svetilke in infrardeča svetilka med delovanjem postaneta zelo vroča. Zato obstaja nevarnost opeklin ob dotiku. Vedno pustite svetilko, da se ohladi, preden jo primete.

- Pred uporabo odstranite ves embalažni material.
- Pri uporabi svetilke na obrazu vedno zaprite oči, da preprečite poškodbe oči (ne glejte neposredno v infrardečo svetlobo).
- Osebe občutljive na toploto ne bi smele uporabljati svetilke. Občutljivost na toploto se lahko zmanjša ali poveča v naslednjih primerih:
  - pri diabetikih
  - pri osebah z nespečnostjo, demenco ali težavami s koncentracijo
  - pri kožnih boleznih ali osebah z brazgotinami na območju uporabe
  - pri alergikih
  - pri otrocih in starejših

- po zaužitju zdravil ali alkohola
- V primeru akutnih vnetnih procesov je uporaba sevanja priporočljiva le po posvetovanju z zdravnikom.
- Vedno omejite čas uporabe in opazujte reakcije na obrazu.
- Zdravila, kozmetika ali hrana lahko povzročijo preobčutljivost kože ali alergijsko reakcijo v določenih pogojih. V tem primeru takoj prekinite obsevanje.
- Če napravo uporabljate neprekinjeno, bodite zelo previdni – nikoli ne zaspite med obsevanjem!
- Dolgotrajna uporaba (dlje od priporočenega časa) lahko povzroči opekline na koži.
- Ne dotikajte se infrardeče svetilke in je ne poskušajte odviti, dokler je priključena na elektriko.
- Otroci ne razumejo tveganj uporabe električnih pripomočkov. Zato poskrbite, da ne bodo uporabljali naprave brez ustreznega nadzora.
- Naprava se sme uporabljati le pod nadzorom.
- Naprave ne shranjujte, dokler je še topla.
- Vedno izključite kabel iz vtičnice in pustite napravo, da se ohladi, preden jo primete.
- Gorljive predmete hranite na razdalji vsaj 1,0 metra od infrardeče svetilke. Ne obešajte svetilke na steno ali strop.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ko je priključena na elektriko; nikoli je ne škropite z vodo ali jo potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Ravnajte z njo s suhimi rokami.
- Zaščitite napravo pred udarci in poškodbami.
- Ne izklaplajte vtiča iz vtičnice s potegom kabla.
- Če je kabel ali ohišje poškodovano, kontaktirajte servis. Ne poskušajte sami popravljati okvar.
- Naprave ne uporabljajte na prostem. Uporabljajte jo samo za njen namen.
- Žarnica ni vključena v garancijo.
- V primeru nepravilne uporabe, napačnega ravnanja ali nepravilnega popravila proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo. Prav tako taka ravnanja izničijo garancijo.
- Naprava ni namenjena komercialni uporabi.

## **VARSTVO OKOLJA**

Embalažo in staro napravo reciklirajte.  
Transportno škatlo odvrzite kot ločeno zbrani odpadke.  
Polietilenske vrečke reciklirajte.

## **Recikliranje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe:**

Simbol na izdelku ali embalaži prikazuje, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek je treba odložiti na ustreznem mestu pooblaščenega zbirališča za recikliranje tovrstnega odpada. S pravilnim odstranjevanjem te naprave boste pripomogli k varstvu narave in okolja pred negativnimi vplivi na zdravje ljudi, ki bi lahko nastali zaradi nepravilnega odstranjevanja izdelka. Več o recikliranju lahko izveste pri lokalnih oblasteh, v zbirnem centru za odpadne gospodinjske aparate ali pri prodajalcu tega izdelka.

# GARANCIJA

Garancija za ta izdelek velja 2 leti od dneva nakupa in se nanaša na elektronski sklop znotraj naprave. Uvoznik se zavezuje, da bo v tem obdobju naprava brezplačno popravljena ali zamenjana, če napake ni mogoče odpraviti. Ta garancija ne pokriva okvar, ki so posledica nepravilne uporabe v nasprotju z navodili iz tega priročnika ali nepooblaščenega poskusa popravila naprave v garancijskem roku.

Garancija ne vpliva na druge pravice, ki pripadajo kupcu na podlagi drugih pravnih podlag. Garancija velja na ozemlju Republike Hrvaške.

**TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE IN NE ZAJEMA ŽARNICE.**

DATUM NAKUPA: .....

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: .....

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si