

# ZLOŽLJIVI INVALIDSKI VOZIČEK



## NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

**SKU: MOBIL-TIM**

## 1. Konstrukcija

Voziček je izdelan iz jeklenega okvirja. Ima zložljive naslone za roke, ki olajšajo sedenje in izstop osebam z zmanjšano gibljivostjo. Opremljen je z zadnjimi kolesi velikosti 8" in sprednjimi kolesi velikosti 6", ročnimi zavorami (zadnja kolesa), sedežem z naslonom, ročajem za transport, varnostnim pasom in oporo za noge.

### Elementi vozička:



## 2. Namen

Invalidski voziček je pripomoček za osebe, ki imajo težave s samostojnim gibanjem, ter za osebe z disfunkcijami in omejitvami gibanja. Upravljanje ga je mogoče le s pomočjo spremljevalca. Voziček ima transportno funkcijo. Njegov namen je olajšati gibanje uporabnika. Posebej se priporoča osebam s težavami pri gibanju, ki so posledica: paralize, prekomerne telesne teže, degeneracije ali deformacije okončin, degeneracije ali poškodbe sklepov, poškodb okončin ali njihove amputacije, srčno-žilnih bolezni, motenj krvnega obtoka.

## 3. Montaža in uporaba


### RAZPIRANJE/ZLAGANJE VOZIČKA:

- Z eno roko primite okvir sedeža, z drugo pa okvir naslona, in razprite voziček, dokler se popolnoma ne razpre. Nato zategnite varnostno zaponko na zadnji strani naslona. Spustite naslone za roke in noge.
- Za zlaganje vozička ponovite korake v obratnem vrstnem redu, začeni s preklopom naslonov za roke in noge. Nato odpnete varnostno zaponko, primite okvir naslona in sedeža ter ju zložite, dokler se voziček popolnoma ne zloži.


### KOČNICE

- Za blokiranje kotača, zategnite gornje ručke kočnice (Slika 1).
- Za otpuštanje pritisnite donje ručke kočnice (slika 2).

- Za kočenje pritisnite gornje ručke kočnice.

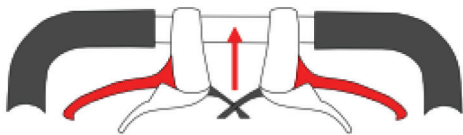

**Slika 1**

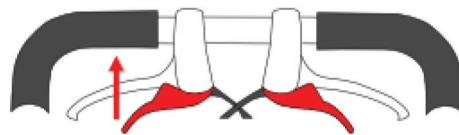

**Slika 2**

#### ODMIKANJE NASLONOV ZA ROKE

- Rahlo dvignite naslone za roke navzgor.
- Ne uporabljajte naslonov za roke kot oporo pri vstajanju. Če je potrebno, poiščite pomoč.

#### ZAVORE

- Za blokado koles zategnite zgornje ročice zavore (slika 1).
- Za sprostitve pritisnite spodnje ročice zavore (slika 2).
- Za zaviranje pritisnite zgornje ročice zavore.

#### OPORA ZA NOGE

- Ne uporabljajte opore za noge kot opore pri sedenju ali izstopanju iz vozička, saj se invalidski voziček lahko prevrne.

#### VARNOSTNI TRAK

- Med uporabo vozička je nujno pripeti varnostni trak.

#### SEDENJE V INVALIDSKI VOZIČEK

- Pri sedenju, izstopanju, spreminjanju položaja uporabnika ali ustavljanju je treba zablokirati zavore.
- Invalidski voziček je treba postaviti čim bližje točki prenosa, tako da je v stiku s posteljo ali drugim sedežem, ki se uporablja. Če se uporabnik ne more samostojno prenesti, ga je treba prenesti v invalidski voziček.
- V voziček se je treba usesti čim globlje, na sredino sedeža, da voziček ne izgubi stabilnosti.

#### ROČAJ ZA TRANSPORT

- Voziček ima ročaj, ki uporabniku olajša njegovo prenašanje in transport.
  - Pred prenašanjem zložite voziček in odstranite ročaj.
- POZOR! Ne izvlecite ročaja, kadar je voziček razprt.

#### 4. Tehnične specifikacije

Skupna širina	51 cm
Notranja širina	41 cm
Ukupna dubina	80 cm
Višina sedeža glede na tla	46 cm
Skupna višina	86 cm
Dimenzije sedeža	41 x 41 cm
Teža	9,5 kg
Največja obremenitev	136 kg
Barva okvirja	bijela

#### 5. Opombe in priporočila

**Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo invalidskega vozička, neupoštevanje varnostnih pravil ali za uporabo v nasprotju z namenom.**

- Pred vsako uporabo vozička preverite delovanje zavor, strukturo in stanje koles. Vozička ne uporabljajte, če so zaznane okvare ali pomanjkljivosti.
- Voziček nima nastavljive širine, pred uporabo preverite, ali je širina vozička primerna za uporabnika.
- Invalidski voziček je namenjen le za krajše razdalje.

## **6. Vzdrževanje**

Elemente vozička je treba redno vzdrževati:

- Sedež je mogoče čistiti s hladno ali toplo vodo z uporabo vlažne (ne mokre) krpe in brez uporabe detergentov. Trdovratnejše madeže očistite z gobico.
- Plastične dele čistite z vlažno krpo.

## **7. Pogoji shranjevanja in transporta**

Izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi, vodi ali vlagi.