

# PALICA S ŠTIRIMI NOGAMI



## NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:


Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

**SKU: QUATRO**

## 1. Konstrukcija

Štirinožna palica je izdelana iz anodiziranega aluminijastega okvirja. Opremljena je z ergonomskimi ročaji, paškom za zapestje, možnostjo nastavitve višine in bazo s štirimi nogami.

Elementi palice:

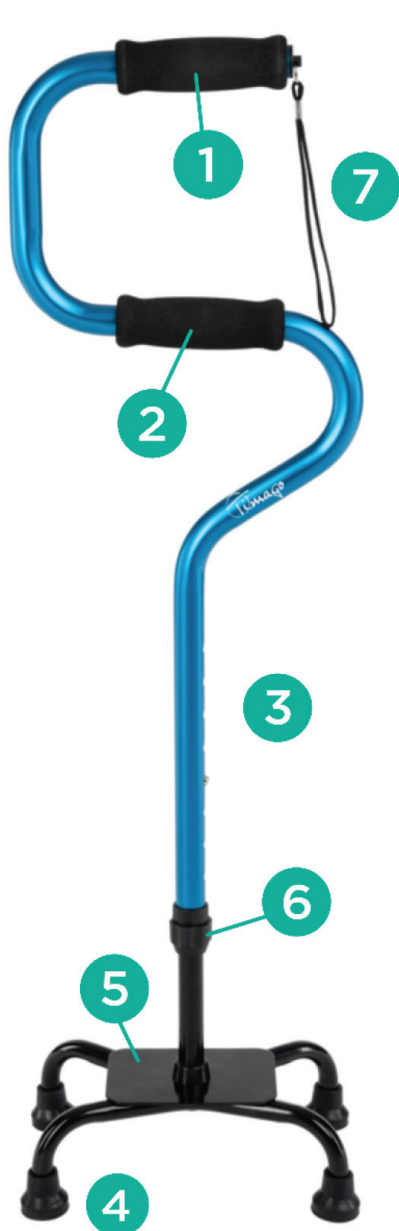

- 1 ročaj
- 2 ročaj za oporo
- 3 nastavitev višine
- 4 gumijaste konice
- 5 osnova
- 6 nastavitve zaklepanja
- 7 zapestnica

## 2. Namen

Štirinožna palica je pomožno pomagalo, zasnovano za osebe z zmanjšano gibljivostjo, ki potrebujejo stabilno oporo in pomoč pri hoji. Priporoča se tudi starejšim osebam kot pomoč pri ohranjanju ravnotežja. Oblika s štirimi nogami zagotavlja večjo stabilnost v primerjavi z običajnimi palicami. Dodatni ročaj uporabniku olajša vstajanje in zagotavlja še boljšo stabilnost.

## 3. Nastavljanje

- Za nastavitev štirinožne palice odvijte varnostni mehanizem in pritisnite blokirni zatič, da izberete ustrezno višino. Nato znova zategnite varnostni mehanizem. Palica se nastavlja v korakih po 2,5 cm.

- Da bi pravilno določili dolžino palice, se postavite vzravnano in upognite roko v komolcu pod kotom 20°.

- Palico je treba individualno prilagoditi uporabniku tako, da je zgornji ročaj v višini kolčnega skle-

pa.

- Pred uporabo preverite, ali je palica stabilna in ali je varnostni mehanizem pravilno zategnjen.

OPOMBA! V primeru dvoma glede tehnike hoje s pomočjo štirinožne palice se posvetujte z osebo, ki ima ustrezno znanje ali kvalifikacije.

#### 4. Tehnična specifikacija

Tip palice	nastavljiva, s sedežem
Nastavitev višine	75-92 cm
Najv. nosilnost	136 kg
Teža	1 kg
Barva	črna

#### 5. Opombe in priporočila

**Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo palice, neupoštevanje varnostnih pravil ali uporabo v nasprotju z namenom.**

- Pred vsako uporabo palice preverite, ali je vse v redu. Ne uporabljajte palice, če so opažene napake ali pomanjkljivosti.

#### 6. Vzdrževanje

Elemente palice je treba redno vzdrževati:

- Sedež se lahko čisti s hladno ali toplo vodo z vlažno (ne mokro) krpo in brez uporabe detergentov. Trdovratnejše madeže očistite z gobico.

#### 7. Pogoji shranjevanja in transporta

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, delovanju vode ali vlagi.

