

TOALETNI STOL - PRINCESKA IN ZLOŽLJIV TOALETNI VOZIČEK



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:
Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: RC300-45 in
RC320-43**

1. UVOD

Hvala, ker ste izbrali stol MOPEDIA komoda podjetja MORETTI S.p.A., zasnovan za pomoč osebam, ki imajo težave pri hoji, iztrebljanju in gibanju. Izdelek ustreza zahtevam veljavnih evropskih predpisov o medicinskih pripomočkih (2017/745). Ta uporabniški priročnik vsebuje nekaj predlogov za pravilno in varno uporabo naprave. Pred uporabo naprave natančno preberite celoten priročnik. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca za ustrezne nasvete in pomoč.

SPLOŠNA OPOZORILA

- NE nameščajte ali uporabljajte izdelka, preden ne preberete in razumete tega priročnika z navodili. Če opozoril, varnostnih ukrepov in navodil ne razumete, se pred poskusom namestitve izdelka obrnite na zdravstvenega delavca, prodajalca ali tehničnega operaterja, da bi se izognili poškodbam ali osebnim nezgodam;
- Vedno se posvetujte s svojim zdravnikom ali terapevtom o pravilni uporabi naprave;
- Izdelka v embalaži ne izpostavljajte virom toplote, saj je embalaža kartonska;
- Življenjska doba naprave je odvisna od obrabe nepovratnih in/ali nezamenljivih delov;
- Vedno bodite previdni, kadar so prisotni otroci;
- Nikoli ne dvigujte stola tako, da držite dele, ki se lahko odstranijo, saj bi se ti med dvigovanjem lahko nenamerno ločili od njega.

3. SPLOŠEN PREGLED DELOV

3.1 RC300-45



1. Naslonjalo za hrbet
2. Zložljiva naslonjala za roke
3. Sedež v obliki črke "U" s prevleko
4. Posoda za iztrebljanje
5. Nastavljive noge po višini

3.2 RC320-43



1. Naslonjalo za hrbet
2. Zložljiva naslonjala za roke
3. Sedež v obliki črke "U" s prevleko
4. Posoda za iztrebljanje
5. Kolesca (zadnja s parkirno zavoro)
6. Dodatki za oporo nog

4. SESTAVLJANJE

4.1 Sestavljanje RC300-45

Izdelek je dobavljen razstavljen, za pravilno sestavo sledite spodnjim korakom:

- Sestavite noge in pazite, da so vse nastavljene na enako višino ter jih pritrдите z ustreznimi C-sponkami;
- Odstranite sedež v obliki črke U iz škatle in ga sestavite na okvir;
- Odstranite sponke na zadnji strani okvirja in sestavite element naslonjala + naslonjala za roke, pri tem pazite, da naslonjala za roke postavite na spodnji del izdelka;
- Zdaj pritrđite naslonjalo s pomočjo prej odstranjenih C-sponk in dvignite naslonjala za roke, da jih zaklenete;




4.2 Sestavljanje RC320-43

Izdelek je dobavljen razstavljen, za pravilno sestavo sledite spodnjim korakom:

- Odstranite zlođljiv okvir iz embalaže in ga postavite tako, da podaljšate prečko, da oblikuje kvadrat;
- Uporabite sedež za zaklep zlođljivega okvirja;
- Odstranite C-sponke na zadnji strani okvirja in sestavite element naslonjala + naslonjala za roke, pri tem pazite, da naslonjala za roke postavite na spodnji del izdelka;
- Zdaj pritrđite naslonjalo s pomočjo prej odstranjenih sponk in dvignite naslonjala za roke, da jih zaklenete;
- Namestite opore za noge;
- Dokončajte sestavo izdelka z namestitvijo posode;

4.3 Prilaganje nog (RC320-43)

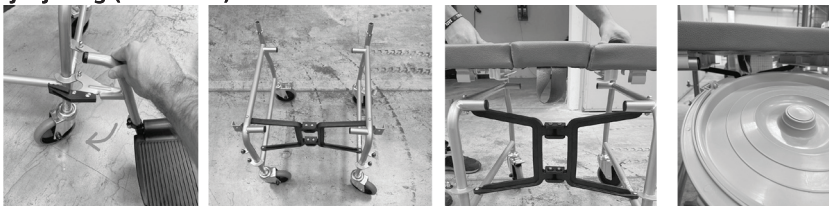

Višino nog na stolu je mogoče prilagoditi, da se bolniku zagotovi največje udobje. Uporabite gumb na strani same plošče za noge za prilagoditev.

Pritisnite gumb in premaknite cev na želeno višino. Vedno preverite, ali sta obe nogi na isti višini na koncu.

4.4 Razstavljanje

Sledite postopku sestavljanja v obratnem vrstnem redu.

5. PRED VSAKO UPORABO

- Preverite pravilnost sestave naprave.
 - Vedno preverite obrabo gibljivih mehanskih delov, da se prepričate, da je napravo mogoče varno uporabljati za ljudi in premoženje.
 - Preverite delovanje zavor na zadnjih kolesih (samo za model s kolesi).
- Vklopite zavora na obeh kolesih in rahlo potisnite stol naprej-nazaj; kolesa se ne smejo premikati.

6. OPOZORILA PRI UPORABI

- Stol je namenjen samo za notranjo uporabo in ni namenjen za druge namene;
- Vedno uporabljajte zadnji ročaj za potiskanje stola in ga nikoli ne potiskajte z drugimi deli (samo za model s kolesi);
- Bodite posebno previdni, če se stol uporablja na poševni površini;
- Izogibajte se nenadnim gibom, če se je treba ustaviti na poševni površini;

- Če dve osebi dvigujeta stol, se izogibajte prijemanju na mestih, ki bi lahko bila nevarna za pacienta, kot so plošče za noge in naslonjala za roke, ter uporabljajte samo okvir in zadnje ročaje;
- Priporočljivo je, da se izdelek hrani stran od virov toplote, saj lahko določeni deli, kot so prevleka naslonjala za hrbet in sedeža, ročaji za potiskanje in naslonjala za roke, če so izpostavljeni sončni svetlobi, dosežejo temperature, ki bi lahko poškodovale kožo.

6.1 Zavore

Zaklenite kolesa stola pred vstopom, izstopom, nagibanjem naprej. Zavore se aktivirajo s pritiskom ročice na vsakem kolesu stola.

6.2 Kolesa

Občasno preverite kolesa in jih po potrebi podmažite.

7. KAKO UPORABLJATI

Opomba: glejte splošna opozorila in uporabniška navodila v tem priročniku



7.1 Sedenje na stol

1. Približajte se stolu, kolikor je mogoče, tako da je postavljen ob vas
2. Zaključajte kočnice na prednjih kotalčima (samo za model s kotalčima); da biste lažje ušli u stolac, podignite naslon za roke na strani na kojoj se izvode te radnje.
3. Oslonite svojo težino na strukturo okvira pomoću ruku i polako se spustite u sjedalo

7.2 Vstajanje s stola

1. Približajte se drugemu sedežu, kolikor je mogoče
2. Zaklenite zavore na sprednjih kolesih (samo za model s kolesi); za lažji vstop v stol dvignite naslonjala za roke na strani, kjer se izvajajo ti gibi.
3. S svojo težo se naslonite na strukturo okvirja z rokami in se počasi spustite na sedež

8. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš stol zahteva minimalno nego in vzdrževanje. Naslednji deli zahtevajo pregled in/ali nego in vzdrževanje.

8.1 Čiščenje prevlek in oblažinj

Prevleke in oblažinjene so izdelani iz PVC-ja. Očistite jih z vodo in blagim milom.

8.2 Čiščenje toaletne posode

Redno čistite in razkužujte straniščno posodo z običajnim razkužilom za kopalnice. Vedno jo očistite vsaj pred vsako uporabo.

8.3 Čiščenje okvirja in kovinskih delov

Uporabite vodo in nevtralno milo za okvir in kovinske dele, nato osušite z mehko krpo, da preprečite praskanje barve okvirja.

8.4 Čiščenje koles (samo za model s kolesi)

Za čiščenje koles uporabite vodo in nevtralno milo. Bodite zelo previdni pri sušenju, saj je uporaba stola z mokrimi kolesi lahko zelo nevarna.

8.5 Razkuževanje

Uporabite običajno razkužilo, če morate razkužiti izdelek.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte izdelkov s kislinami, lugi ali topili, kot sta aceton ali redčilo.

9. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

RC300-45	62	53	43	96,5-103,5	73,5-81,5	51,5-59,5	-	48	45	55	11,5	12,5	12,5	120
RC320-43	87,5	62,5	43	96,5	74,5	52,5	30-38	43	45	52,5	12,5	12,5	12,5	120