

PALICA Z ODPRTIM ROČAJEM ZA DEBELE LJUDI



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-naslov: prodaja@medicaldirect.si
Spletna stran: www.medicaldirect.si

SKU: RH150 in RH720

NAMEN

Palica za hojo MOPEDIA in štirinožna palica sta pripomočka, ki se uporabljata z eno roko in sta prilagojena za podporo in/ali pomoč pri gibanju oseb z gibalnimi težavami.

SPLOŠNA OPOZORILA

Pred uporabo naprave natančno preberite celoten priročnik.

- Posvetujte se z zdravnikom ali terapevtom, da določite pravilno nastavev in ustrezno uporabo izdelka.
- Preverite, ali je izdelek dostavljen v celoti, in ga hranite zapakiranega stran od virov toplote.
- Omejitev uporabe naprave je določena z obrabo delov.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo ali jo uporabljajo.

SPLOŠEN OPIS

RH150

Palica za hojo RH150 je izdelana iz jekla in jo odlikuje odprt ročaj iz PVC-ja ter širok gumijast nedrseč nastavek. Nastavljiva višina na vsakih 2,5 cm. Palica olajša ohranjanje pokončnega položaja in hojo. Stabilizira osebo pri težavah z ravnotežjem in jo podpira pri pomanjkanju moči.

RH720


Štirinožna palica je izdelana iz jekla in jo odlikuje odprt ročaj iz PVC-ja ter nedrseči gumijasti nastavki. Višina nastavljiva na vsakih 2,5 cm. Uporabna je za lažje ohranjanje stoječega položaja uporabnika. Stabilizira osebo pri težavah z ravnotežjem in jo podpira pri pomanjkanju moči.

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba palice za hojo in štirinožne palice se razlikuje od primera do primera. Zaradi tega je potrebna minimalna usposobljenost s strani kvalificiranega osebjia glede informacij o vrsti stopnice ali vrsti podpore. Če je med nego bolnika potreben asistent, naj stoji ob strani telesa, ki je šibkejša in bolj prizadeta.

Podešavanje visine za RH150

Za nastavev višine palice:

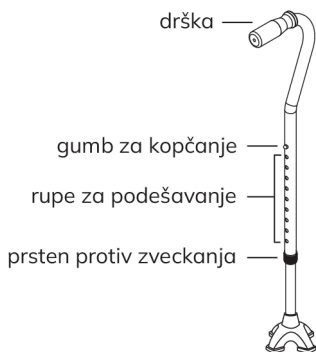


- Obrnite protizvonilni obroč v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zrahljate;

- Pritisnite zapiralni gumb;
- Pomaknite nastavke navzgor ali navzdol, dokler zapiralni gumb ne izskoči skozi nastavitveno odprtino na koncu ročaja palice (ko zapiralni gumb varno izskoči skozi nastavitveno odprtino, se bo slišal »klik«);
- Zategnite protizvonilni obroč v smeri urinega kazalca.

Nastavev višine za RH720

Za nastavev višine štirinožne palice sledite spodnjim navodilom:

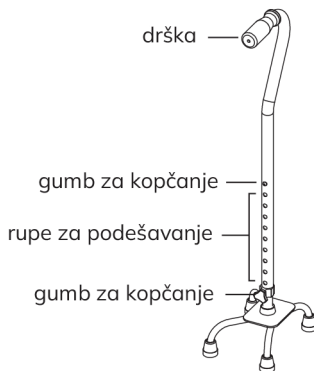

- Zrahljajte zaklepni gumb z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca;
- Pritisnite zapiralni gumb;
- Pomaknite nastavke navzgor ali navzdol, dokler zapiralni gumb ne izskoči skozi nastavitveno odprtino na koncu ročaja palice (ko zapiralni gumb varno izskoči skozi nastavitveno odprtino, se bo slišal »klik«);
- Zategnite zaklepni gumb z vrtenjem v smeri urinega kazalca.

Nastavev palice za uporabo z desno ali levo roko

Za nastavev strani uporabe palice na desno ali levo je potrebno:

- Zrahljajte zaklepni obroč;
- Pritisnite zapiralni gumb in zavrtite ročaj palice za 180 stopinj, dokler se gumb ne zaklene v isto odprtino za nastavev višine na drugi strani palice;
- Ko je ročaj palice trdno nameščen na želeno višino in zapiralni gumb izstopa skozi nastavitveno odprtino na ročaju palice, obrnite zaklepni obroč v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Čiščenje

Uporabite le vlažno krpo in nevtralno milo. Nato pred uporabo dobro osušite.

Razkuževanje

Če je potrebno izdelek razkužiti, uporabite običajno nevtralno razkužilno sredstvo.