

JEKLENI VALJAR ZA DEBELE LJUDI APOLLO



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: RH520

1. UVOD

Hvala, ker ste kupili rolator MORETTI, ki pomaga ljudem s težavami pri hoji v notranjih in zunanjih prostorih, med potovanjem ali v vsakdanjem življenju. Ta priročnik z navodili vam ponuja predloge za pravilno uporabo in za vašo varnost. Priporočamo, da pred uporabo pozorno preberete ta priročnik z navodili. V primeru nejasnosti se obrnite na svojega prodajalca.

2. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE uporabljajte naprave, preden ne preberete in razumete tega priročnika;
- Če ne razumete opozoril, varnostnih ukrepov ali navodil, se pred poskusom namestitve te opreme posvetujte s prodajalcem, zdravstvenim delavcem ali tehničnim osebjem, da se izognete poškodbam ali škodi;
- Rolator smejo uporabljati le pacienti z ustrezno motorično sposobnostjo, ki omogoča njihovo uporabo brez tveganja;
- Posvetujte se z zdravnikom ali terapevtom, da določite natančno prilagoditev in pravilno uporabo;
- Rolatorji niso namenjeni uporabi kot invalidski vozički.
- Preverite, ali je zavorna žica pravilno nameščena;
- Po vsaki nastavitvi višine preverite delovanje zavore, da se izognete prostemu upogibanju žice;
- Rolator se sme uporabljati le na trdi, ravni površini. Ne uporabljajte rolatorja za plezanje po stopnicah;
- Vedno se naslanjajte na oba ročaja za ohranjanje ravnotežja;
- Posebno pozornost namenite mokrim, poledenim ali zasneženim površinam;
- Ne preobremenjujte rolatorja;
- Ne uporabljajte sedeža rolatorja za prevoz oseb ali stvari, sedež je namenjen počitku ob vključenih parkirnih zavorah;
- Vsa kolesa morajo biti ves čas v stiku s tlemi med uporabo, da se zagotovi pravilno ravnotežje rolatorja in največja varnost;
- Zavora mora biti aktivirana pred uporabo sedeža.

3. SPLOŠNI POGLED DELOV



4. SESTAVLJANJE

- Preverite, ali sta obe podporni cevi za ročaj pravilno vstavljeni v okvir in pritrjeni;
- Ne obečajte ničesar na okvir rolatorja, da se izognete ukvirljanju cevi, ko je rolator odprt, in s tem poškodovanju stabilnosti. Poškodbe lahko nastanejo tudi zaradi deformacij;
- Pazite, da si med odpiranjem in zapiranjem ne priprete prstov in/ali oblačil.

4.2 Odpiranje rolatorja

Odprite rolator s potegom sprednjega dela okvirja in potegom zadnjih nog. Namestite cevi ročajev v okvir. Obrnite gumbе za zaklepanje, dokler se ne zaklenejo.

4.3 Zlaganje rolatorja

Zaprte rolator s potegom stranskih palic in vračanjem sprednjega dela okvirja rolatorja proti zadnjemu delu.

4.4 Prilagoditev ročajev

Nastavite višino ročajev s stranskimi gumbi. Odvijte gumb, nastavite ročaje na želeno višino, obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da ga zategnete, in ga ponovno pritrдите. Ponovite za drugi ročaj in preverite, ali sta oba ročaja nastavljeni na enaki višini.

4.5 Košara

Nakupovalna košara visi na rolatorju in je dostopna z dvigom sedeža.

4.6 Sedež

Preden sedete, postavite rolator na ravno in trdno površino ter nato zaklenite zavore. Preverite, ali so zavore dobro zaklenjene in ali je rolator v stabilnem položaju.

5. KAKO UPORABLJATI

- Začnite potiskati, ko ste v pokončnem položaju z obema rokama na ročajih;
- Preverite, ali imate suhe roke pred uporabo rolatorja, da se izognete tveganju zdrsa;
- Hodite tako, da ohranjate pokončen položaj z očmi usmerjenimi naprej, ne navzdol;
- Ne potiskajte rolatorja predaleč od telesa, to lahko povzroči padce in neustrezno obremenitev;
- Ne uporabljajte rolatorja za premagovanje stopnic višjih od 20 mm;

6. ZAVORE

Dobro delovanje zavor je odvisno od obrabe in nabrane umazanije na kolesih. Pred vsako uporabo preverite stanje zavor in koles.

6.1 Uporaba zavor

Za zaviranje rolatorja povlecite ročico zavor s prsti navzgor, dokler se rolator ne upočasni ali ustavi. Za nadaljevanje premikanja rolatorja spustite ročice zavor.

6.2 Za zaklepanje koles

Pritisnite ročice zavor z dlanjo navzdol, ko zaslišite "klik" so kolesa zaklenjena. Z vlekom obeh ročic navzgor se zavore odklenijo.

7. NEGA IN VZDRŽEVANJE










Vaš rolator zahteva minimalno nego in vzdrževanje. Za čiščenje pripomočka in konstrukcije uporabite raztopino alkohola in nevtralnega mila (v enakih delih), pomešano z vodo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo materialov, ki bi lahko poškodovali površino izdelka ali s korozivnimi kemikalijami med čiščenjem.

8.1 Razkuževanje

Če morate izdelek razkužiti, uporabite običajno razkuževalno sredstvo.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte izdelkov s kislinami, lugi ali topili, kot so aceton ali redčilo.

9. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

									
RH520	68	78-94	55	75	60	12,3	20	20	200

