

# TOALETNI STOL ZA DEBELE LJUDI



## NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

**SKU: RH780**

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

## 1. UVOD

Zahvaljujemo se, da ste kupili izdelke za tuširanje Moretti. Ta uporabniški priročnik podaja nekaj predlogov za pravilno uporabo izbranega izdelka in daje nekaj dragocenih nasvetov za vašo varnost. Pred uporabo izdelka natančno preberite priročnik. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca za nasvet in pomoč. V primeru nejasnosti priporočamo, da se obrnete na trgovca, ki vam lahko pomaga in poda ustrezen nasvet.

## 2. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE uporabljajte tega izdelka ali katere koli razpoložljive dodatne opreme, ne da bi predhodno v celoti prebrali in razumeli ta priročnik z navodili. Če ne razumete opozoril, previdnostnih ukrepov ali navodil, se pred uporabo te opreme posvetujte z zdravstvenim delavcem, trgovcem ali tehničnim osebjem, sicer lahko pride do poškodb ali škode.
- Stolca za tuširanje ne izpostavljajte virom toplote.
- Omejitev uporabe izdelka je določena z obrabo delov.
- ROKE in PRSTE vedno držite stran od gibljivih delov, da preprečite poškodbe.
- NE dovolite otrokom, da se igrajo ali upravljajo s stolcem za tuširanje.

## 3. SPLOŠNI PREGLED DELOV

Jeklena konstrukcija s sedežem in naslonom iz HDPE. PE naslonjali za roke z možnostjo dvigovanja. Nedrseči gumijasti nastavki. Nastavljiva višina. Lahko se uporablja v 4 funkcijah: dvignjena WC deska, opora za WC, stol in klop za tuširanje.

## 4. SESTAVLJANJE

- Izdelek je dobavljen že sestavljen. Edini elementi, ki jih je treba sestaviti, so noge. Za namestitev nog pritisnite gumb za zaklepanje na vsaki nogi in vstavite noge. Položaj pritrdite z zaklepanjem gumba v eni izmed obstoječih lukenj.

## 5. KAKO UPORABLJATI

- Pri sedenju se ne naslanjajte samo na eno stran;
- Vedno se naslonite na obe roki, da vstanete in ohranite ravnotežje;
- Če stol uporablja oseba s težavami pri gibanju, ji vedno pomagajte pri sedenju ali vstajanju s stola.

Za nastavitve višine:

- Pritisnite gumb za fiksiranje in pomaknite cev na želeno višino;
- Položaj pritrdite z zaklepanjem gumba v eni izmed obstoječih lukenj.

## 6. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Stol MORETTI je bil pred dajanjem na trg skrbno preverjen in opremljen z zaščitnim znakom CE. Za varnost pacientov predlagamo, da redno preverjate naslednje dele:

- Glavni okvir izdelka in spojni deli;
- Sestava in delovanje koles/hog;
- Vse točke varjenja;
- Obraba nastavkov, kjer so prisotni.

### 6.1 Čiščenje

Za čiščenje pripomočka in konstrukcije uporabite raztopino alkohola in nevtralnega mila (v enakih delih) pomešano z vodo.

### 6.2 Dezinfekcija

Uporabite običajno sredstvo za razkuževanje, če morate izdelek dezinficirati.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte izdelkov s kislinami, lugji ali topili, kot sta aceton ali redčilo.

## 7. TEHNIČNE LASTNOSTI

Dimenzije: D: 71 cm Š: 51,5 cm V: 74,5 do 85,5 cm

Sedež: 59 x 47 x 5,5 cm

Višina sedeža: 49 do 60 cm

Višina naslonjal za roke: 67 do 78 cm

Največja nosilnost: 290 kg