

# INVAĽIDSKI STRANIŠČE IN VOZIČEK ZA PRHANJE ZA DEBELE LJUDI



## NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

**SKU: RH840**

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

## 1. UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelkov za tuširanje Moretti. Ta uporabniški priročnik vsebuje nekaj predlogov, kako pravilno uporabljati izdelek, ki ste ga izbrali, in nudi nekaj dragocenih nasvetov za vašo varnost. Pred uporabo izdelka natančno preberite priročnik. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca za nasvet in pomoč. V primeru dvomov priporočamo, da se obrnete na trgovca, ki vam lahko pomaga in poda ustrezen nasvet.

## 2. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE UPORABLJAJTE tega izdelka ali katere koli razpoložljive dodatne opreme brez predhodnega popolnega branja in razumevanja tega priročnika z navodili. Če ne razumete opozoril, previdnostnih ukrepov ali navodil, se pred uporabo te opreme posvetujte z zdravstvenim delavcem, trgovcem ali tehničnim osebjem, sicer lahko pride do poškodb ali škode.
- Stol za tuširanje držite stran od virov toplote.
- Meja uporabe izdelka je določena z obrabo delov.
- ROKE in PRSTE VEDNO držite stran od gibljivih delov, da se izognete poškodbam.
- NE DOVOLITE otrokom, da se igrajo z ali rokujejo s stolom za tuširanje.

## 3. SPLOŠEN PREGLED DELOV


Samohodni voziček za tuširanje. Jekleni okvir, ki ga je mogoče razstaviti, sedež in naslon iz PU. Zložljivi nasloni za roke, zložljivi in odstranljivi nasloni za noge.

## 4. SESTAVLJANJE

Izdelek je dostavljen delno sestavljen in za sestavo ni potrebno nobeno orodje. Voziček za tuširanje je sestavljen iz naslednjih delov:

- leva stran okvirja;
- desna stran okvirja;
- naslon za hrbet;
- naslon za levo in desno nogo;
- sedež in prevleka za sedež;
- posoda;
- 4 x C-sponke z varnostno zaporo;
- 2 x pritrditvena gumba;
- 2 x povezovalni cevi.

Za dokončanje montaže izvedite naslednje korake:

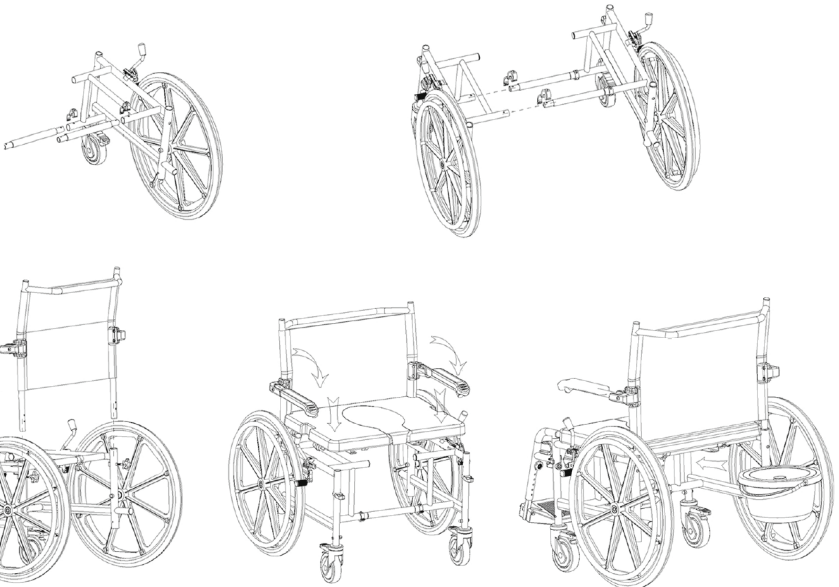

- Vstavite pritrditveni cevi na levo ali desno stran okvirja, poravnajte luknje in vstavite C-sponke;
- Povežite novo sestavljen del z drugo stranjo okvirja z uporabo enakih dveh pritrditvenih cevi in dodatnih dveh C-sponk, kot je opisano v prejšnji točki;
- Vstavite naslon za hrbet v luknje na okvirju invalidskega vozička in pritrdite naslon z dvema pritrditvenima gumboma;
- Namestite sedež na okvir invalidskega vozička in ga pritisnite navzdol, da fiksirate položaj, nato dodajte prevleko;
- Vstavite naslone za noge s strani in jih obrnite naprej, dokler se ne pritrdijo v nosilec;
- Vstavite posodo s hrbtni strani stola za tuširanje tako, da jo potisnete v utore.

## 5. KAKO UPORABLJATI

Za premikanje vozička uporabljajte samo zadnji ročaj, nikoli ne uporabljajte drugih opor. Seznanite se s svojimi zmoglostmi in omejitvami v zvezi z močjo in vzdržljivostjo, preden se poskusite povzpeti po klančini. Priporočljiva je pomoč, kadar je naklon večji od 10 %. Če se morate ustaviti na nagnjeni površini, se izogibajte nenadnim gibom. Med spuščanjem se ne obračajte nenadoma. Dvignite stol po potrebi z uporabo glavnega okvirja, ne naslonov za roke ali noge.

## ZAVORE

Voziček lahko zavrete s pritiskom na ročico na vsakem kolesu. Če morate nastaviti ročico zavore, odvijte matico, premaknite sponko v zeleni položaj in jo nato znova zategnite.

## WC

WC uporabljajte, ko je invalidski voziček popolnoma blokiran. Za uporabo WC-ja odstranite premični del sedeža z uporabo ročaja na sprednjem delu. Posodo odstranite z ročajem.

## NASTAVITEV VIŠINE

Naslon za hrbet in roke je mogoče skupaj nastaviti na dve različni višini. Odvijte in odstranite gumbe, ki pritrjujejo naslon za hrbet, in po potrebi dvignite ali spustite naslon. Na koncu ponovno vstavite in zategnite gumbe.

## NASTAVITEV NASLONOV ZA NOGE

Naslone za noge stola za tuširanje lahko prilagodite glede na vaše potrebe:

- Odvijte vijak;
- Nastavite višino naslona za noge;
- Ponovno privijte vijak. Preverite, ali sta oba naslona za noge nastavljeni na enako višino.

## 6. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Stol MORETTI je bil pred dajanjem na trg natančno preverjen in opremljen z zaščitnim znakom CE. Za varnost pacientov predlagamo redno preverjanje naslednjih delov:

- glavni okvir izdelka in povezovalni deli;
- montaža in delovanje koles/nog;
- vse točke varjenja;
- obraba konic, kjer je prisotna.

### 6.1 Čiščenje

Za čiščenje pripomočka in konstrukcije uporabite raztopino alkohola in nevtralnega mila (v enakih delih) pomešano z vodo.

### 6.2 Raskuževanje

Uporabite običajno razkužilno sredstvo, če morate izdelek razkužiti.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte izdelkov s kislinami, lugi ali topili, kot so aceton ali redčilo.

## 7. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Dimenzije: D: 83 cm Š: 100 cm V: 97 cm

Sedež: 61 x 40 cm

Višina sedeža: 50,5 cm

Največja nosilnost: 200 kg