

NASTAVEK ZA WC ŠKOLJKO VIŠINE 10 ,6 ALI 14 CM



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

**SKU: RP400-6, RP400-
10, RP400-14, RP410-6,
RP410-10 i RP410-14**

1. UVOD

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali univerzalni straniščni sedež MOPEDIA znamke Moretti. Njegova zasnova in kakovost zagotavljata maksimalno udobje, varnost in zanesljivost. Ta navodila vsebujejo koristne nasvete za pravilno uporabo in pomembne opombe za vašo varnost. V primeru dvoma se obrnite na svojega prodajalca, ki vam bo znal pomagati in vam ustrezno svetovati.

2. NAMEN UPORABE


Stranišnični sedež MOPEDIA je pripomoček, namenjen osebam z omejeno mobilnostjo pri uporabi stranišča.

POZOR!

- Prepovedana je uporaba te naprave za namene, ki niso navedeni v teh navodilih.
- Moretti S.p.A. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe naprave ali uporabe, ki ni v skladu s temi navodili.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe naprave in teh navodil brez predhodnega obvestila, da bi izboljšal lastnosti izdelka.

3. DELI NAPRAVE

- A. Dvigalo
- B. Objemke
- C. Notranji rob
- D. Sprednji rob

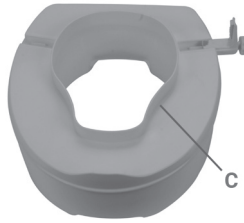

4. NAVODILA ZA MONTAŽO

- Stranske objemke vstavite na naslednji način: obrnite dvižno ploščo stranišča MOPEDIA in jo postavite na ravno in stabilno površino. Vstavite obe objemki v ustrezna stranska vodila, ju nežno potisnite in zavrtite ročaja vijakov v smeri urinega kazalca, da pritrdite objemki na dvižno ploščo.

POZOR! Če se ročaj prosto vrti: objemko trdno pritisnite ob navoj, ki je vtisnjen v dvižno ploščo, in vzdržujte stalen pritisk na ročaj, da zagotovite stik med vijakom in navojem.

Opomba: Objemk na tej stopnji ne zategnite do konca, sicer dvižna plošča stranišča MOPEDIA ne bo mogoče namestiti na keramiko straniščne školjke.

- Dvignite pokrov in sedež straniščne školjke ter namestite sedež straniščne školjke MOPEDIA na keramiko straniščne školjke s sponkami obrnjenimi proti zadnji strani straniščne školjke. Prepričajte se, da je notranji rob popolnoma znotraj straniščne školjke, sprednji rob pa zunaj.

Opomba: Sedež mora biti popolnoma raven na keramiki straniščne školjke.

- Ročaja objemke zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite rahlega upora, nato pa preverite, ali je straniščna deska MOPEDIA varno pritrjena na stranišče in se ne more premakniti.

POZOR! Zaklepni mehanizem je zasnovan tako, da omogoča enostavno in enostavno nastavitve. Pomembno je, da ročaja ne obračate več, ko objemka doseže kontaktni položaj s straniščem.

5. NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Vse dele lahko operete s toplo vodo in nevtralnimi milom. Straniščno desko MOPEDIA lahko popolnoma potopite v vodo in razkužite z ustreznimi razkužili.

6. PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ne prekoračite največje nosilnosti 136 kg.
- Pred uporabo vedno preverite, ali je straniščna deska MOPEDIA varno pritrjena na stranišče in da ni poškodovana, kar bi lahko ogrozilo stabilnost izdelka.
- Deske ne uporabljajte kot oporo za stanje ali sedenje na stranišču.