

LUKSUZNI VALJČEK ATLANTA



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

SKU: RP520

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

1. UVOD

Hvala, ker ste izbrali rolator MOPEDIA podjetja MORETTI S.p.A. kot podporo osebam s težavami pri gibanju znotraj in zunaj doma, med potovanji ali pri enostavnih vsakodnevnih dejavnostih. Ta uporabniški priročnik vsebuje majhne nasvete za pravilno uporabo pripomočka, ki ste ga izbrali, in dragocene nasvete za vašo varnost. Priporočljivo je, da ta priročnik pozorno preberete v celoti pred uporabo rolatorja. Če imate kakršne koli dvome, se obrnite na distributerja, ki vam bo pomagal in vas pravilno svetoval. Opomba: Preverite, ali so vsi deli rolatorja poškodovani med dostavo. V primeru poškodbe izdelka ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca za nadaljnja navodila.



Pozor!

Uporaba tega izdelka za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, je prepovedana. Moretti S.p.A. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka ali uporabe, ki ni navedena v tem priročniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe naslednjega priročnika brez predhodnega obvestila, da bi izboljšal njegove lastnosti.

2. NAMEN

Ta rolator je namenjen osebam z motoričnimi težavami in se lahko uporablja kot pomoč pri lažjem hoji. Rolator zagotavlja večjo stabilnost, podporo in varnost med hojo. V nobenem primeru ga ne smejo uporabljati osebe z vidno oslabljeno funkcijo roke in/ali dlani ter osebe z motnjami ravnotežja. Rolator se lahko uporablja zunaj in znotraj. Priporočljiva je uporaba samo na površinah, kjer vsa kolesa dotikajo tla. Ne sme se uporabljati na kamnitih tleh ali nagnjenih površinah, saj je rolator v teh primerih lahko nestabilen. Izdelek ni namenjen prevozu oseb ali drugega materiala.

3. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE nameščajte ali uporabljajte izdelka pred branjem in razumevanjem tega priročnika.
- Če opozoril, previdnostnih ukrepov in navodil ne razumete, se posvetujte z zdravstvenim delavcem, prodajalcem ali tehničnim osebjem, preden poskusite namestiti izdelek, da se izognete škodi ali telesni poškodbi.
- Rolator lahko uporabljajo samo pacienti z ustrezno motorično sposobnostjo, ki zagotavlja varno uporabo brez tveganja.
- Posvetujte se s svojim zdravnikom ali terapevtom, da ugotovite ustreznost izdelka, nastavitev in pravilno uporabo rolatorja.
- Vaš zdravnik ali terapevt vam mora pomagati pri nastavitvi višine rolatorja za maksimalno podporo, pravilno aktivacijo zavore in splošno pravilno sestavljanje.

3.1 Opozorila za uporabo

1. Vedno preverite, ali je zavorna žica pravilno pritrjena.
2. Vedno preverite pravilno delovanje zavore po vsaki nastavitvi višine, da se izognete prostemu ali prekomernemu upogibanju žice.
3. Neupoštevanje teh preprostih opozoril lahko povzroči poškodbe.
4. Rolator se sme uporabljati samo na trdni, ravni površini. Ne plezajte po stopnicah z rolatorjem!
5. Vedno se naslonite na oba ročaja, da ohranite ravnotežje.
6. Bodite posebej pozorni na mokre, poledenele ali zasnežene površine.
7. Ne preobremenjujte rolatorja.
8. Ne uporabljajte sedeža rolatorja (če obstaja) za prevoz predmetov ali oseb; sedež je namenjen sedenju uporabnika z vključeno parkirno zavoro.
9. Vsa kolesa morajo biti v stiku s tlemi ves čas uporabe, da se zagotovi pravilno ravnotežje rolatorja in največja varnost.
10. Parkirna zavora mora biti vključena pred uporabo sedeža.

3.2 Opozorila glede stabilnosti

- Vključno z obremenitvijo košare za shranjevanje rolator nudi podporo osebi s težo do 136 kg
- Košara ima omejitve teže 5 kg. Ne preobremenjujte je, da se izognete neravnotežju in tveganju prevrnitve.

3.3 Opozorila za montažo

- Po postavitvi ali zlaganju rolatorja preverite, ali je varnostna naprava pritrjena v pravilen položaj.
- Preverite, ali sta obe podporni cevi ročajev pravilno vstavljeni v rolator in trdno pritrjeni z vijaki za zaklepanje s krilnimi maticami.
- Ne obešajte ničesar na okvir rolatorja, da preprečite deformacijo cevi in ogrozitev njegove stabilnosti.
- Bodite pozorni na morebitno ukleščanje prstov in/ali oblačil med fazo odpiranja in zapiranja.

4. SPLOŠNI OPIS

5. PRED VSAKO UPORABO

- Da so vsi deli hodulje trdno zaklenjeni;



- Ali so vsi vijaki zategnjeni;
- Preverite pravilno delovanje običajne zavore in parkirne zavore;
- Nastavite višino ročajev s pomočjo stranskih regulatorjev;
- Odvijte gumb, nastavite ročaje na želeno višino, obrnite gumb v smeri urnega kazalca in dobro zategnite;
- Ponovite za drugi ročaj in preverite, ali sta oba ročaja nastavljeni na enako višino.

6. NAVODILA ZA SESTAVO, ZNAČILNOSTI IN PRILAGODITEV

Izdelek razpakirajte in preverite, ali ni poškodovan med prevozom. Če je hodulja poškodovana, se obrnite na najbližjega prodajalca.

- Odprite hoduljo tako, da povlečete sprednji del s pomočjo ročice na zadnjih nogah.
 - Vstavite cevi ročajev v konstrukcijo. Obrnite regulatorje za zaklepanje, dokler se ne zaklenejo.
 - Nastavite višino ročajev s pomočjo stranskih regulatorjev.
 - Odvijte in odstranite regulator, nastavite ročaje na želeno višino, vstavite in obrnite regulator v smeri urnega kazalca, da ga ponovno pritrdite in trdno zategnete. Ponovite za drugi ročaj in preverite, ali sta oba ročaja nastavljeni na enako višino.
 - Zapiranje: Dvignite stranske palice in vrnite sprednji del hodulje nazaj.
 - Košara za shranjevanje je pritrjena na okvir hodulje.
 - Preden sedete, postavite hoduljo na ravno in trdno površino ter zaklenite zavore.
- Prepričajte se, da je zapah dobro pritrjen in da je hodulja v stabilnem položaju.

7. UPORABA

- Začnite potiskati, ko ste v pokončnem položaju z obema rokama na ročajih;
- Preverite, ali so vaše roke suhe pred uporabo hodulje, da se izognete nevarnosti zdrsa;
- Hodite v pokončnem položaju s pogledom usmerjenim naprej, ne navzdol;
- Ne potiskajte hodulje predaleč od telesa, to lahko povzroči padce in neustrezne obremenitve;
- Ne uporabljajte hodulje za prečkanje stopnic višjih od 20 mm;
- Pri uporabi na prostem izbirajte pločnike, ki so ustrezno urejeni v skladu s predpisi za odstranjevanje arhitekturnih ovir.

8. ZAVORE

Pravilno delovanje zavor je odvisno od obrabe in nakopičene umazanije na kolesih. Preverite stanje zavor in koles pred vsako uporabo.

8.1 Uporaba zavor

Za zaviranje hodulje povlecite ročice zavor s prsti navzgor, dokler se hodulja ne upočasni ali ustavi. Za nadaljevanje gibanja hodulje spustite ročice zavor.

8.2 Zaklepanje zavor (ročna zavora)

Pritisnite ročice zavor z dlanjo navzdol, ko zaslišite klik, so kolesa zaklenjena. Dvignite ročice zavor iz položaja za ustavitve, da jih sprostite.



POZOR!

Ko počivate na valji, morajo biti zavori zaklenjene.

8.3 Odklepanje koles

Povlecite obe ročici zavor, dokler se ne sprostita.

9. OPOZORILA ZA UPORABO

- Previdno uporabljajte na mokrih in spolzkih površinah
- Ne prekoračite največje teže pacienta, navedene na nalepki izdelka in v poglavju tehnične značilnosti tega priročnika
- Sedež se lahko uporablja samo na trdni, ravni površini. Ne uporabljajte sedeža na stopnicah ali naklonih
- Ne uporabljajte stola na način, ki ni naveden v teh navodilih za uporabo. Vsaka odgovornost za nepravilno uporabo stola je izključena
- Izogibajte se puščanju stola na prostem in v stiku z vodo za daljši čas
- Občasno preverjajte stabilnost in trdnost izdelka ter stanje podpornih čepov ali koles. Zamenjajte jih, ko so obrabljeni
- Če imate dvome glede uporabe, nastavitve ali vzdrževanja izdelka, se obrnite na prodajalca
- Da bi se izognili kakršnim koli nevarnostim, hranite napravo izven dosega otrok

10. UPORABA

- Sedite in razporedite težo po celotnem sedežu. Ne sedite in se ne potiskajte v stran
- Vedno se naslonite na oba naslona za roke, ko vstajate in se uravnate
- V primeru uporabe stola s strani oseb s posebnimi motoričnimi težavami jim vedno pomagajte pri sedenju in vstajanju s stola

11. VZDRŽEVANJE

Naprave linije MOPEDIA podjetja Moretti S.p.A. so ob vstopu na trg skrbno preverjene in označene z oznako CE. Zaradi varnosti pacienta in zdravnika se priporoča, da pooblaščen oseba vsakih 2 leti preveri primernost hodulje za uporabo. V primeru popravila se smejo uporabljati samo originalni rezervni deli in dodatki. Uporabna doba izdelka je odvisna od uporabe, vzdrževanja, shranjevanja in čiščenja.

12. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo, navlaženo z vodo ali mlačno vodo in nevtralnimi milom ter osušite s čisto, suho krpo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe, povzročene z uporabo materialov, ki lahko poškodujejo površino izdelka, ali kemičnih korozivnih sredstev, uporabljenih med čiščenjem.



POZOR!

Ne uporabljajte abrazivnih snovi, kislin, alkohola, detergentov na osnovi klora, razkužil in acetona, saj te snovi povzročajo odrgnine plastičnih delov in rjavenje kovinskih površin.

Če je potrebno, izdelek razkužite z blagim razkužilnim detergentom.

12.1 Vzdrževanje koles

- 1. Očistite kolesa z mlačno vodo in nevtralnim detergentom. Osušite s čisto krpo.
- 2. Občasno namažite kolesa.

13. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Dimenzije v cm										
	68	80 - 93	56	61	46	26	8.5	20	20	136 kg

Sedež: 36x39 cm
Konstrukcija: Aluminij