

ZLOŽLJIV ROLATOR DYONE



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: RP690B

1. UVOD

Hvala, da ste izbrali hoduljo MOPEDIA podjetja MORETTI S.p.A. kot podporo osebam z motnjami pri gibanju v notranjih in zunanjih prostorih, med potovanji ali pri preprostih vsakdanjih opravilih. Ta uporabniški priročnik vsebuje majhne nasvete za pravilno uporabo izbranega pripomočka in dragocene napotke za vašo varnost. Priporočljivo je, da pred uporabo hodulje natančno preberete celoten priročnik. Če imate kakršne koli dvome, se obrnite na distributerja, ki vam bo pomagal in vas ustrezno svetoval. Opomba: Preverite, ali so bili vsi deli hodulje med prevozom poškodovani. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca za nadaljnja navodila.



POZOR!

Uporaba tega izdelka za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, je prepovedana. MORETTI S.p.A. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka ali uporabe, ki ni navedena v tem priročniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe naprave in naslednjega priročnika brez predhodnega obvestila, da bi izboljšal njene lastnosti.

2. NAMEN

Ta hodulja je namenjena osebam z motoričnimi težavami in se lahko uporablja kot pomoč pri hoji. Hodulja zagotavlja večjo stabilnost, podporo in varnost med hojo. V vsakem primeru je ne smejo uporabljati osebe z vidno oslABLJENO funkcijo rok in/ali dlani ter osebe z motnjami ravnotežja. Hodulja se lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem. Priporočamo uporabo samo na površinah, kjer so vsa kolesa v stiku s tlemi. Ne sme se uporabljati na kamnitih tleh ali nagnjenih površinah, saj je takrat lahko nestabilna. Izdelek ni namenjen za prevoz oseb ali drugega materiala.

3. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE nameščajte ali uporabljajte izdelka, preden ne preberete in razumete teh navodil.
- Če opozoril, previdnostnih ukrepov in navodil ne razumete, se pred namestitvijo izdelka posvetujte z zdravstvenim delavcem, prodajalcem ali tehničnim osebjem, da se izognete poškodbam ali škodi;
- Hoduljo smejo uporabljati le pacienti z ustreznimi motoričnimi sposobnostmi, ki zagotavljajo varno uporabo;
- Posvetujte se z zdravnikom ali terapevtom, da ugotovite ustreznost izdelka, prilagoditve in pravilno uporabo hodulje;
- Vaš zdravnik ali terapevt vam mora pomagati pri prilagoditvi višine hodulje za maksimalno podporo, pravilno aktiviranje zavore in splošno pravilno sestavo.

3.1 Opozorila pri uporabi

1. Vedno preverite, ali je zavorna žica pravilno pritrjena.
2. Vedno preverite delovanje zavore po vsaki nastavitvi višine, da se izognete prostemu in prekomernemu upogibanju žice.
3. Neupoštevanje teh preprostih opozoril lahko povzroči poškodbe.
4. Hoduljo uporabljajte samo na trdni, ravni površini. Ne vzpenjajte se po stopnicah s pomočjo hodulje!
5. Vedno se naslonite na oba ročaja za ohranjanje ravnotežja.
6. Posebno pozornost namenite mokrim, poledenelim ali zasneženim površinam.
7. Ne preobremenjujte hodulje.
8. Ne uporabljajte sedeža hodulje (če obstaja) za prevoz predmetov ali oseb; sedež je namenjen sedenju uporabnika s vključeno parkirno zavoro;
9. Vsa kolesa morajo biti ves čas v stiku s tlemi za pravilno ravnotežje in maksimalno varnost.
10. Parkirna zavora mora biti aktivirana pred uporabo sedeža.

3.2 Opozorila glede stabilnosti

- Skupaj z obremenitvijo košare za shranjevanje hodulja nudi podporo osebi do 136 kg
- Košara ima omejitev teže 5 kg. Ne preobremenjujte je, da se izognete neravnotežju in tveganju za prevrnitev.
- Spodnji nosilec ima omejitev teže 5 kg. Ne preobremenjujte ga, da se izognete neravnotežju in tveganju za prevrnitev.

3.3 Opozorila za montažo

- Po namestitvi ali zlaganju hodulje preverite, ali je varnostna naprava pritrjena v pravilen položaj.
- Preverite, ali sta obe podporni cevi ročajev pravilno vstavljeni v hoduljo in trdno pritrjeni z vijaki in krilnimi maticami.
- Na okvir hodulje ne obešajte ničesar, da ne pride do deformacije cevi in da ne ogrozite njene stabilnosti.
- Bodite pozorni na morebitno ujetje prstov in/ali oblačil med odpiranjem in zapiranjem.

4. SPLOŠNI OPIS



5. PRED VSAKO UPORABO

- Da so vsi deli hodulje trdno zaklenjeni;
- Ali so vsi vijaki zategnjeni;
- Ali je sedež pravilno zaklenjen (če ni, pritisnite sedež navzdol proti okvirju);
- Ali je blokirna naprava sedeža pravilno vstavljena;
- Preverite pravilno delovanje normalne zavore in parkirne zavore;
- Nastavite višino ročajev z bočnimi regulatorji;
- Odvijte gumb, nastavite ročaje na zeleno višino, zavrtite gumb v smeri urinega kazalca in dobro zategnite;
- Postopek ponovite za drugi ročaj in preverite, ali sta oba ročaja nastavljeni na enako višino.

6. NAVODILA ZA SESTAVO, LASTNOSTI IN PRILAGODITEV

- Razpakirajte izdelek in preverite, da med prevozom ni bil poškodovan.
- Če je hodulja poškodovana, se obrnite na najbližjega prodajalca;
- Odprite hoduljo s potegom sprednjega dela ob vzvode na zadnjih nogah;
- Potisnite sedež navzdol, dokler varnostna naprava ne zaklene prečko okvirja zadnjih koles;
- Vstavite cevi ročajev v konstrukcijo in gumbje za zaklepanje v ustrezne odprtine;
- Zavrtite gumbje za zaklepanje, dokler cevi ročajev niso dobro pritrjene;
- Plastično posodo namestite nad sedež;
- Sprednjo košaro pritrdite tako, da jo zataknete na dve zatiči pod sedežem.

7. UPORABA

- Začnite potiskati, ko ste v pokončnem položaju z obema rokama na ročajih;
- Preverite, ali so vam roke suhe pred uporabo hodulje, da se izognete nevarnosti zdrsa;
- Hodite pokončno s pogledom naprej, ne navzdol;
- Ne potiskajte hodulje predaleč od telesa, to lahko povzroči padce in neustrezno obremenitev;
- Ne uporabljajte hodulje za prečkanje stopnic višjih od 20 mm;
- Pri uporabi na prostem izberite pločnike, ki so ustrezno urejeni v skladu s predpisi za odstranitev arhitektonskih ovir.

8. ZAVORE

Pravilno delovanje zavor je odvisno od obrabe in nabiranja umazanije na kolesih. Pred vsako uporabo preverite stanje zavor in koles.

8.1 Uporaba zavor

Za zaviranje hodulje povlecite ročice zavor s prsti navzgor, dokler se hodulja ne upočasni ali ustavi. Za nadaljevanje premikanja hodulje sprostite zavorne ročice.

8.2 Zaklep zavor (ročna zavora)

Pritisnite zavorne ročice z dlanjo navzdol; ko zaslišite klik, so kolesa zaklenjena. Dvignite ročice zavor iz položaja zaustavitve, da jih sprostite.



POZOR!

Ko počivate na valji, morajo biti zavori zaklenjene.

8.3 Odklepanje koles

Povlecite obe ročici zavor, dokler se ne sprostita..

9. OPOZORILA ZA UPORABO

- Pazljivo uporabljajte na mokrih in spolzkih površinah
- Ne prekoračite največje teže pacienta, navedene na nalepki izdelka in v poglavju tehnične lastnosti tega priročnika

Sedež se lahko uporablja samo na trdni, ravni površini. Ne uporabljajte sedeža na stopnicah ali nagibih

- Ne uporabljajte stolčka na način, ki ni opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka odgovornost za nepravilno uporabo stolčka je izključena
- Izogibajte se puščanju stolčka na prostem in v stiku z vodo dlje časa
- Občasno preverite stabilnost in trdnost izdelka, pa tudi stanje podpornih konic ali koles. Zamenjajte jih, ko se obrabijo
- Če imate dvome glede uporabe, nastavitve ali vzdrževanja izdelka, kontaktirajte prodajalca.
- Da se izognete kakršnim koli tveganjem, hranite napravo izven dosega otrok

10. UPORABA

- Sedite in razporedite težo po celotnem sedežu. Ne sedite in se ne naslanjajte vstran
- Vedno se naslonite na oba naslonjala za roke pri vstajanju in ohranjanju ravnotežja
- Če stolček uporabljajo osebe s posebnimi motoričnimi težavami, jim vedno pomagajte pri sedenju in vstajanju s stolčka

11. VZDRŽEVANJE

Naprave linije MOPEDIA podjetja Moretti S.p.A. so ob uvajanju na trg skrbno preverjene in označene z oznako CE. Zaradi varnosti pacienta in zdravnika se priporoča, da pooblaščen oseba preveri ustreznost rotorja za uporabo vsakih 2 leti. V primeru popravila je dovoljeno uporabljati le originalne rezervne dele in dodatno opremo. Uporabna doba izdelka je odvisna od uporabe, vzdrževanja, shranjevanja in čiščenja.

12. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Za čiščenje izdelka uporabljajte le krpo, navlaženo z vodo ali mlačno vodo in nevtralnimi milom, ter osušite s čisto, suho krpo. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, povzročene z uporabo materialov, ki lahko poškodujejo površino izdelka, ali kemičnih korozivnih sredstev, uporabljenih med čiščenjem.



POZOR!











Ne uporabljajte abrazivnih snovi, kislin, alkohola, detergentov na osnovi klora, razkužil in acetona, saj te snovi povzročajo odrgnine plastičnih delov in rjavenje kovinskih površin.

Po potrebi razkužite izdelek z blagim razkužilnim detergentom.

12.1 Vzdrževanje koles

1. Kolesa očistite z mlačno vodo in nevtralnimi detergentom. Osušite s čisto krpo.
2. Občasno namažite kolesa.

13. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Dimenzije V cm										
	69	77 - 98	59	58	44	24	9.5	20	20	136 kg

Sedež: 38x16 cm

Struktura: Železo