

ERA ROLATOR Z OPORO ZA PODLAKTI



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

SKU: RP691

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

1. UVOD

Hvala ker ste izbrali rolator MOPEDIA podjetja MORETTI S.p.A. za podporo osebam s težavami pri gibanju v notranjih in zunanjih prostorih, med potovanji ali pri vsakodnevnih aktivnostih. Ta uporabniški priročnik vsebuje koristne nasvete za pravilno uporabo izbranega pripomočka ter pomembne napotke za vašo varnost. Priporočljivo je, da pred uporabo rolatorja natančno preberete celoten priročnik. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na distributerja, ki vam bo pomagal in vas pravilno usmeril.

Opomba: Preverite, ali je kateri del rolatorja poškodovan med transportom. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca za nadaljnja navodila.



POZOR!

Uporaba tega izdelka za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, je prepovedana. MORETTI S.p.A. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka ali uporabe, ki ni navedena v tem priročniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe naprave in naslednjega priročnika brez predhodnega obvestila, da bi izboljšal njene lastnosti.

2. NAMEN

Ta rolator je namenjen osebam z motoričnimi težavami in se lahko uporablja kot pripomoček za lajšanje hoje. Rolator zagotavlja večjo stabilnost, podporo in varnost med hojo. Ne smejo ga uporabljati osebe z izrazito oslABLJENO funkcijo rok in/ali dlani ter osebe s težavami z ravnotežjem. Rolator je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Priporoča se uporaba samo na površinah, kjer so vsa kolesa v stiku s tlemi. Ne sme se uporabljati na kamnitih terenih ali na nagnjenih površinah, kjer lahko postane nestabilen. Izdelek ni namenjen prevozu oseb ali drugih bremen.

3. SPLOŠNA OPOZORILA

- NE nameščajte ali uporabljajte izdelka, dokler ne preberete in razumete teh navodil.
- Če opozoril, previdnostnih ukrepov ali navodil ne razumete, se pred namestitvijo izdelka posvetujte z zdravstvenim delavcem, prodajalcem ali tehničnim osebjem, da se izognete poškodbam ali materialni škodi.
 - Rolator smejo uporabljati samo pacienti z ustreznimi motoričnimi sposobnostmi, ki omogočajo varno uporabo.
 - Posvetujte se s svojim zdravnikom ali terapevtom, da ugotovite primernost izdelka, nastavitvev in pravilno uporabo rolatorja.
 - Vaš zdravnik ali terapevt vam mora pomagati prilagoditi višino rolatorja, zagotoviti pravilno delovanje zavore ter pravilno sestavo pripomočka.

3.1 Opozorila za uporabo

1. Vedno preverite, ali je zavorna žica pravilno pritrjena.
2. Po vsaki prilagoditvi višine preverite pravilno delovanje zavore, da preprečite nenadzorovano popuščanje zavorne žice.
3. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do poškodb.
4. Rolator uporabljajte samo na trdni in ravni površini. Ne vzpenjajte se po stopnicah z rolatorjem!
5. Vedno se opirajte na oba ročaja za ohranjanje ravnotežja.
6. Posebno pozornost namenite mokrim, poledenele ali zasneženim površinam.
7. Ne preobremenjujte rolatorja.
8. Sedeža (če je vključen) ne uporabljajte za prevoz predmetov ali oseb; namenjen je sedenju uporabnika ob vklopljeni parkirni zavori.
9. Vsa kolesa morajo biti med uporabo ves čas v stiku s tlemi za zagotavljanje stabilnosti in varnosti.
10. Pred uporabo sedeža mora biti parkirna zavora aktivirana.

3.2 Opozorila o stabilnosti

- Skupaj s težo bremena v košari rolator podpira osebo s težo do 136 kg.
- Košara ima nosilnost 5 kg. Ne preobremenjujte je, saj to lahko povzroči nestabilnost ali prevrnitev.
- Spodnji nosilec ima nosilnost 5 kg. Ne preobremenjujte ga iz istih razlogov.

3.3 Opozorila pri montaži

- Po postavitvi ali zlaganju rolatorja preverite, ali je varnostni mehanizem pravilno zaklenjen.
- Preverite, ali sta obe nosilni cevi ročajev pravilno vstavljeni in trdno pritrjeni z vijaki in krilnimi maticami.
- Ne obečajte predmetov na okvir rolatorja, da se cevi ne deformirajo in ne ogrozijo stabilnosti.
- Previdno ravnajte, da med odpiranjem ali zlaganjem ne stisnete prstov ali oblačil.

4. SPLOŠNI OPIS



5. PRED VSAKO UPORABO

- Preverite, ali so vsi deli rolatorja pravilno zaklenjeni.
- Preverite, ali so vsi vijaki zategnjeni.
- Preverite delovanje ročne in parkirne zavore.
- Nastavite višino ročajev s stranskimi regulatorji.
- Odvijte gumb, nastavite ročaje na ustrezno višino, nato gumb privijte v smeri urinega kazalca.
- Ponovite postopek za drugi ročaj in preverite, ali sta ročaja na enaki višini.

6. NAVODILA ZA SESTAVO, LASTNOSTI IN NASTAVITVE

- Odprite embalažo in preverite, ali izdelek ni poškodovan.
- Če je rolator poškodovan, se obrnite na prodajalca.
- Odprite rolator tako, da povlečete sprednji del navzven s pomočjo vzvoda na zadnjih nogah.
- Vstavite cevi antibrahialnih nosilcev v konstrukcijo. Privijte vijake, dokler niso zablokirani.
- Nastavite višino nosilcev s stranskimi regulatorji. Odvijte regulator, nastavite višino, nato ga ponovno privijte in dobro zategnite. Ponovite na obeh nosilcih.
- Zapiranje: dvignite stranske palice in povrnite sprednji del v začetni položaj.
- Posoda je namenjena shranjevanju manjših predmetov.
- Košara je pritrjena na okvir rolatorja.
- Pred sedenjem zagotovite, da je rolator na stabilni, ravni površini, in aktivirajte parkirno zavoro.
- Preverite, da je zapah pravilno pritrjen in da je rolator v stabilnem položaju.

7. UPORABA

- Začnite potiskati rolator v pokončni drži z rokami na ročajih.
- Pred uporabo se prepričajte, da so roke suhe, da preprečite drsenje.
- Hodite pokončno in glejte naprej, ne navzdol.
- Ne potiskajte rolatorja predaleč od telesa, saj to lahko povzroči padec.
- Ne uporabljajte rolatorja na stopnicah višjih od 20 mm.
- Na prostem uporabljajte pravilno urejene površine in pločnike.

8. ZAVORE

Učinkovitost zavor je odvisna od obrabe in umazanije na kolesih. Pred vsako uporabo preverite stanje zavor in koles.

8.1 Uporaba zavore

Za zaviranje povlecite ročice navzgor, dokler se rolator ne upočasni ali ustavi. Za nadaljevanje hoje sprostite ročice.



POZOR!

Ko počivate na valji, morajo biti zavore zaklenjene.

8.2 Zaklep zavore (parkirna zavora)

Potisnite ročice naprej, dokler ne zaslišite »klik«. Kolesa so zaklenjena. Za sprostitev potegnite ročice proti sebi.

8.3 Odklepanje koles

Povlecite obe ročici, dokler se kolesa ne sprostijo.

9. OPOZORILA ZA UPORABO

- Previdno uporabljajte na mokrih ali spolzkih površinah.
- Ne preokračite največje teže uporabnika, navedene na izdelku in v tehničnih podatkih.
- Sedež uporabljajte le na ravnih in trdnih površinah, nikoli na stopnicah ali klančinah.
- Ne uporabljajte rolatorja na način, ki ni naveden v teh navodilih.
- Ne puščajte rolatorja dalj časa na prostem ali izpostavljenega vodi.
- Občasno preverite stabilnost, trdnost in stanje koles ter zamenjajte obrabljene dele.
- Če ste v dvomih glede uporabe, nastavitve ali vzdrževanja, kontaktirajte prodajalca.
- Hranite izdelek izven dosega otrok.

10. UPORABA

- Sedite na sredino sedeža in enakomerno razporedite težo. Ne sedite poševno.
- Pri vstajanju se opirajte na oba ročna naslona.
- Osebam s težjimi motoričnimi težavami vedno pomagajte pri sedenju in vstajanju.

11. VZDRŽEVANJE

Izdelki MOPEDIA podjetja Moretti S.p.A. so ob vstopu na trg temeljito pregledani in označeni s CE oznako. Za varnost uporabnika se priporoča, da pooblaščen oseba preveri ustreznost rolatorja vsaki 2 leti. Pri popravilih uporabljajte samo originalne rezervne dele. Življenjska doba izdelka je odvisna od uporabe, vzdrževanja, shranjevanja in čiščenja.

12. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE



POZOR!

Ne uporabljajte abrazivnih snovi, kislin, alkohola, detergentov na osnovi klora, razkužil in acetona, saj te snovi povzročajo odrgnine plastičnih delov in rjavenje kovinskih površin.











Za čiščenje uporabljajte mehko krpo, navlaženo z vodo ali mlačno vodo z blagim milom, nato osušite s suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, ki lahko poškodujejo površino.

Po potrebi dezinficirajte z blagim razkužilnim sredstvom.

12.1 Vzdrževanje koles

1. Očistite kolesa z mlačno vodo in blagim detergentom ter osušite.
2. Občasno jih namažite.

13. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Dimenzije v cm										
	64	98 - 120	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

Sedež: 38x16 cm

Konstrukcija: Železo