

4-V-1 WC IN TUŠ STOL/VO- ZIČEK



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: RP780 in RP782

1. UVOD

Hvala, ker ste izbrali pripomoček iz Morettijeve linije MOPEDIA. Večnamenski kopalniški stoli Moretti so zasnovani in izdelani tako, da zadovoljijo vse vaše potrebe po praktični, pravilni in varni uporabi. Ta priročnik vsebuje nasvete za pravilno uporabo naprave, ki ste jo izbrali, in dragocene nasvete za vašo varnost. Priporočljivo je, da ta priročnik pred uporabo naprave natančno preberete. Če imate kakršnekoli dvome, se obrnite na prodajalca, ki vam bo lahko pomagal in vam pravilno svetoval.

2. NAMEN

Večnamenski kopalniški stoli MOPEDIA znamke Moretti služijo kot pomoč pri prhanju in kopanju ter so primerni za osebe s težavami pri hoji. Vključujejo štiri funkcije v enem: stabilizacijsko desko za straniščno školjko, stojalo za straniščno školjko, udoben sedež in desko za prhanje.



POZOR!

- Uporaba naslednje naprave za namene, ki niso opredeljeni v tem priročniku, je prepovedana.
- Moretti S.p.A. zavrača kakršno koli odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe naprave ali uporabe, ki ni navedena v tem priročniku.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe naprave in naslednjega priročnika brez predhodnega obvestila za izboljšanje njenih funkcij.

3. SPLOŠNA OPOZORILA

- Za pravilno uporabo naprave glejte ta priročnik
- Po potrebi se posvetujte z zdravnikom ali terapevtom za ugotavljanje pravilne nastavitve in uporabe naprave
- Komplet držite stran od virov toplote
- Življenjska doba naprave je določena z obrabo delov, ki jih ni mogoče popraviti in/ali zamenjati
- Otrokom NE dovolite igranja s stolom

4. SPLOŠNI OPIS

4.1 Večnamenski kopalniški stoli

RP780 Fiksni model

RP782 Zložljiv model na kolesih

Večnamenski kopalniški stoli MOPEDIA so izdelani iz eloksiranega aluminija, z udobnim PVC sedežem in protizdrsni gumijastimi nastavki (z izjemo modela RP782, ki je opremljen z vrtljivimi kolesi). Višinsko nastavljivi vsakih 2,5 cm. Vključujejo štiri funkcije v enem: stabilizacijsko desko za straniščno školjko, stojalo za straniščno školjko, udoben sedež in desko za prhanje.

5. PRED VSAKO UPORABO

- Vedno preverite obrabljenost delov na način, ki zagotavlja pravilno uporabo in varnost oseb in stvari
- Preverite, ali je varnostni gumb pravilno vstavljen v odprtino za nastavitev višine, ter vse spoje

6. PRED SESTAVLJANJEM

Izdelek razpakirajte in preverite, da med prevozom ni bil poškodovan. Če je izdelek poškodovan, se obrnite na prodajalca.

7. MONTAŽA

RP780 Vstavite stojalo za straniščno školjko v priložen že sestavljen izdelek in pazite, da pravilno namestite stojalo z zadnjo vodoravno palico.

RP782 Razprite stranske dele konstrukcije, dvignite del z že nameščenim straniščnim stojalom in pritrdite oba konca na stranske dele. Vstavite stojalo za straniščno školjko in pazite, da pravilno namestite stojalo z zadnjo vodoravno palico.

8. SEDEŽ



Pritisnite varnostni gumb za nastavev višine sedeža z odstranitvijo notranjega dela noge in nastavite odprtino na zeleno višino. Preverite, ali so vse štiri noge nastavljene na enako višino.

9. OPOZORILA ZA UPORABO

- Previdno uporabljajte na mokrih in spolzkih površinah
- Ne prekoračite največje teže pacienta, navedene na nalepki izdelka in v poglavju tehnične značilnosti tega priročnika
- Sedež se lahko uporablja le na trdni, ravni površini. Ne uporabljajte sedeža na stopnicah ali naklonih
- Ne uporabljajte stola na način, ki ni naveden v teh navodilih za uporabo. Vsaka odgovornost za nepravilno uporabo stola je izključena
- Izogibajte se puščanju stola na prostem in v stiku z vodo dalj časa
- Občasno preverite stabilnost in trdnost izdelka ter stanje podpornih nastavkov ali koles. Zamenjajte jih, ko so obrabljeni
- Če ste v dvomih glede uporabe, namestitve ali vzdrževanja izdelka, kontaktirajte trgovca
- Da bi se izognili kakršnimkoli tveganjem, napravo hranite izven dosega otrok

10. UPORABA

- Sedite in razporedite težo po celotnem sedežu. Ne sedajte in ne potiskajte vstran
- Vedno se naslonite na oba naslona za roke, da vstanete in ohranite ravnotežje
- V primeru uporabe stola pri osebah s posebnimi motoričnimi težavami jim vedno pomagajte pri sedenju in vstajanju s stola



POZOR! Naprave ne premikajte, medtem ko pacient sedi.

11. VZDRŽEVANJE

Naprave linije MOPEDIA so ob uvajanju na trg skrbno preverjene in označene z oznako CE. Zaradi varnosti pacienta in zdravnika se priporoča, da pooblaščen oseba preveri ustreznost za uporabo vašega izdelka najmanj vsaki 2 leti. Periodični pregled vključuje pregled naslednjih delov:

- Nosilna konstrukcija stola in spojni deli
- Preverite sestavo in delovanje koles z njihovo zavoro (pri modelih s kolesi)
- Preverite vse varilne točke
- Preverite obrabo nastavkov

V primeru popravila je dovoljeno uporabljati le originalne rezervne dele in dodatke.

12. ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

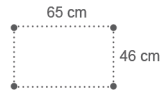
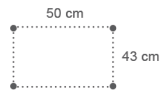
Za čiščenje izdelka uporabljajte le krpo, navlaženo z vodo ali mlačno vodo in nevtralnimi milom, ter osušite s čisto, suho krpo. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, povzročene z uporabo materialov, ki lahko poškodujejo površino izdelka, ali kemičnih korozivnih sredstev, uporabljenih med čiščenjem.



POZOR! Ne uporabljajte abrazivnih snovi, kislin, alkohola, detergentov na osnovi klora, razkužil in acetona, ker te snovi povzročajo odrgnine plastičnih delov in rjavenje kovinskih delov.

Če je potrebno, izdelek razkužite z blagim razkužilnim detergentom.

13. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Kode | Največja nosilnost | Višina naslona za roke | Višina sedeža | Osnovno | Uporabljeni materiali |
|-------|--------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| RP780 | 130 kg | Od 66 do 76 cm | Od 45 do 55 cm |  | Aluminijasta cevasta konstrukcija |
| RP782 | | Od 64 do 74 cm | Od 47 do 57 cm |  | |

Dimenzije imajo toleranco ± 1 cm

14. REZERVNI DELI IN DODATNA OPREMA

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | RV7058-4 Sedež in prevleka za udobni sedež RP780 in RP782 Mere odprtine: 20,5 x 24 cm |  | RV7069-1 Vedro, ročaj in pokrov za udoben sedež RP780 in RP782 |
|  | RV7024 Ø 29 mm Konice nog za RP780 (4 kosi) |  | RV7051 Vrtljiva kolesa za RP782 (par) |