

TUŠ STOL Z NASLONJALOM IN OGRAJO



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: RS839

OPIS IZDELKA

Tuš stol Moretti RS839 je izdelan iz aluminijaste konstrukcije z ergonomskim sedežem in naslonom iz visoko gostotnega polietilena (HDPE). Opremljen je z nasloni za roke, protidrnsnimi gumijastimi nastavki in je nastavljen po višini, kar omogoča varnost in udobje med tuširanjem.

SESTAVLJANJE IZDELKA

1. Obrnite sedež na glavo in namestite dve U-okvirni strukturi nog, pritrдите ju na sredino sedeža s pomočjo kratkih vijakov.
2. Vstavite nosilce naslona in jih pritrдите na sedež in na nosilce nog s pomočjo dolgih vijakov.
3. Naslon pritrдите na njegove nosilce s preostalimi kratkimi vijaki.
4. Dodajte štiri noge in jih nastavite na želeno višino s pomočjo zatičev.

PRED UPORABO

- Preverite, ali je okvir poškodovan.
- Preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni.
- Preverite stabilnost stolčka na ravni podlagi.

NAVODILA ZA UPORABO

- Prilagajanje višine:
 1. Pritisnite varnostni gumb na vsaki nogi.
 2. Premaknite cev noge na želeno višino.
 3. Preverite, ali so vse štiri noge nastavljene na enako višino in ali je varnostni gumb pravilno nameščen.
- Uporaba:
 1. Pri usedanju stol vedno zagotovite stabilnost – uporabnikom z zmanjšano gibljivostjo priporočamo pomoč.
 2. Gumijaste protidrnsne noge preprečujejo drsenje, vendar bodite kljub temu previdni na mokrih in spolzkih površinah.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Čistite z blagim detergentom in toplo vodo z mehko krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, kislin, alkohola, sredstev na osnovi klora ali acetona, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.
- Po potrebi razkužite z nevtralnimi razkužilom.
- Redno preverjajte stabilnost, trdnost spojev in stanje zaščitnih elementov.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne uporabljajte izdelka za uporabnike, katerih teža presega največjo nosilnost 136 kg.
- Bodite previdni na mokrih ali spolzkih površinah.
- Izdelka ne puščajte zunaj, izpostavljenega vremenskim vplivom.
- Če imate kakršnekoli dvome glede sestavljanja, prilagajanja ali vzdrževanja, se obrnite na prodajalca.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: širina 46 cm, globina 40 cm, višina 80–99 cm
- Dimenzije sedeža: 41 × 34 cm, višina sedeža 47–66 cm
- Material: aluminijast okvir, HDPE sedež in naslon
- Protidrnsne gumijaste noge
- Največja nosilnost: 136 kg