

VARNOSTNA OGRAJA ZA STRANIŠČE – PROSTOSTOJEČA



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

SKU: RS908

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

OPIS IZDELKA

Varnostna samostoječa ograja za toalet Moretti RS908 je izdelana iz barvanega jekla z nastavljivo širino in višino, namenjena nudenju opore osebam, ki potrebujejo dodatno varnost pri uporabi WC-ja. Ograja ima mehko oblažene ročaje in protizdrsne gumijaste čepke za večjo stabilnost.

SESTAVLJANJE IZDELKA

1. Povežite obe stranski strani ograje s pomočjo povezovalnih palic.
2. Za pritrditev uporabite priložene sponke (zaponke) in preverite, da so dobro pritrjene.
3. Ko je okvir v celoti sestavljen, nastavite višino nog:
 - Pritisnite varnostni gumb na vsaki nogi.
 - Prilagodite višino po potrebi, pri čemer pazite, da so vse štiri noge na enaki višini.
4. Preverite stabilnost celotnega okvirja in trdnost vseh spojev pred uporabo.

PRILAGAJANJE DIMENZIJ

• Prilaganje širine:

Odstranite povezovalne palice, premaknite stranske okvirje na zeleno širino, nato ponovno pritrдите palice s pomočjo sponk.

• Prilaganje višine:

Na vsaki nogi pritisnite varnostni gumb, prilagodite višino in ponovno zavarujte z gumbom.

PRED UPORABO

- Preverite, ali je okvir pravilno sestavljen in ali so vse sponke in gumbi dobro pritrjeni.
- Preverite, ali so vse štiri noge enake višine in da ograja stabilno stoji na ravni podlagi.
- Preverite stanje protizdrsnih gumijastih čepkov.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Čistite z blagim detergentom in toplo vodo s pomočjo mehke krpe.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, kislin, alkohola, sredstev na osnovi klora ali acetona, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.
- Po potrebi razkužite z nevtralnimi razkužilnimi sredstvom.
- Redno preverjajte stabilnost, trdnost spojev in stanje zaščitnih elementov.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne uporabljajte izdelka za uporabnike, katerih teža presega največjo nosilnost 136 kg.
- Bodite previdni na mokrih ali spolzkih površinah.
- Izdelka ne puščajte zunaj, izpostavljenega vremenskim vplivom.
- Če imate kakršnekoli dvome glede sestavljanja, nastavljanja ali vzdrževanja, se obrnite na prodajalca.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: širina 62 – 71 cm, globina 50 cm, višina 66 – 77 cm
- Material: barvano jeklo, oblaženi ročaji
- Protizdrsne gumijaste noge
- Nastavljiva širina in višina
- Največja nosilnost: 136 kg