

POHODNA PALICA S SEDEŽEM



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:


Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: SEAT-TIM

1. Konstrukcija

Palica s sedežem je sestavljena iz ergonomsko oblikovanega ročaja, visokokakovostnega aluminijastega ročnika in protizdrsne gumijaste konice. Opremljena je s sedežem, ki ga podpirajo tri noge, kar uporabniku omogoča varen in udoben počitek. Zaradi nastavitve višine je zelo praktična za vsakodnevno uporabo.

Elementi palice:

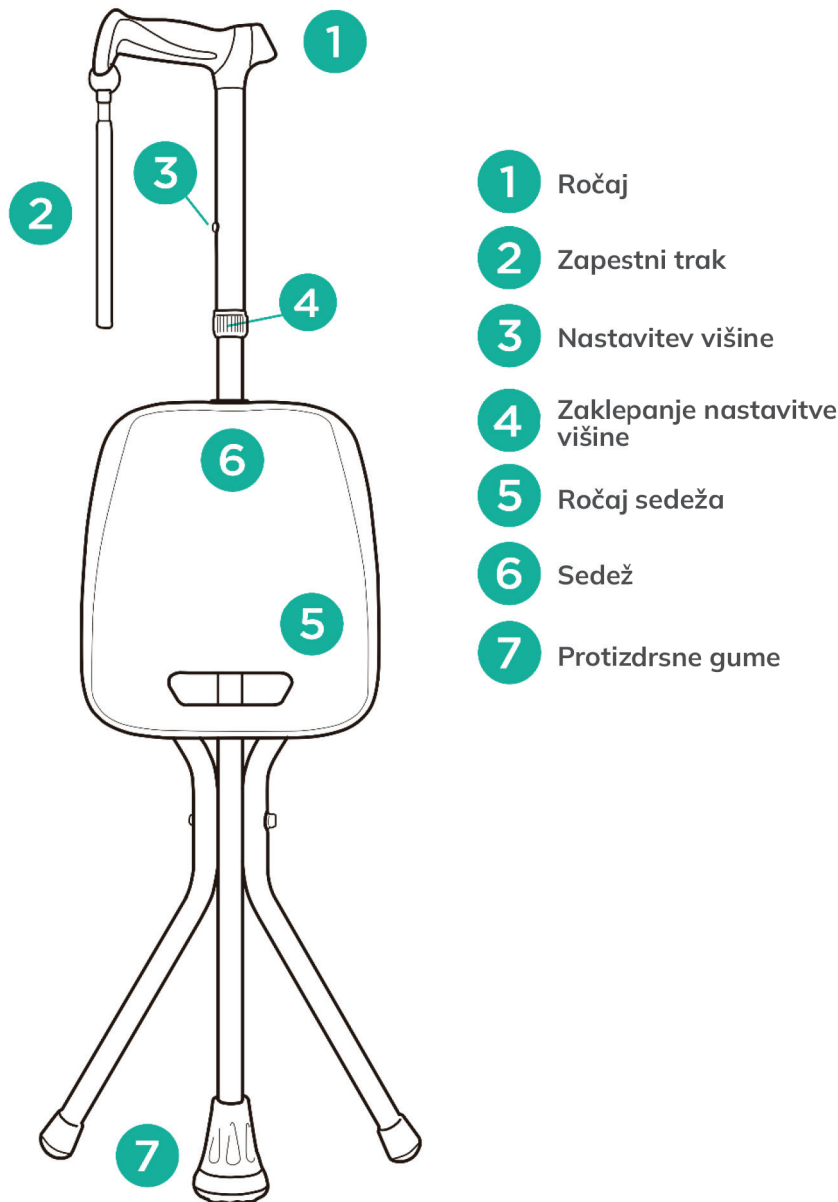

2. Namen

Palica je pomožni pripomoček, ki se uporablja za povečanje oporne površine pri težje gibljivih bolnikih. Priporoča se tudi bolnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri hoji, lahko pa se uporablja tudi kot pomoč pri ohranjanju ravnotežja po poškodbah spodnjih okončin ali trupa.

Kontraindikacije: motnje koordinacije in ravnotežja, napredovane revmatske spremembe, poškodbe in disfunkcije zgornjih okončin, ki lahko ovirajo oporo na palico.

3. Nastavljanje

Nastavljanje

- Za nastavitev palice odvijte nastavitveno zaponko in pritisnite gumb za zaklepanje. Izberite ustrezno dolžino s pritiskom na gumb za zaklepanje, nato zategnite nastavitveno zaponko. Palica je nastavljiva v korakih po 2,5 cm.
- Za razpiranje sedeža primite ročaj sedeža in ga potegnite navzgor. Pritisnite sedež na nasprotni strani (območje pritiska), da zagotovite popolno razprtost.
- Za zlaganje ponovite korake v obratnem vrstnem redu.

- Za nastavitev pravilne dolžine palice stojte vzravnano in upognite roko v komolcu pod kotom 20°.
- Palico je treba individualno prilagoditi uporabniku tako, da je ročaj v višini kolčnega sklepa.
- Pred uporabo preverite, ali je palica stabilna in ali gumb za zaklepanje v celoti sega skozi odprtino za nastavitev na palici.

OPOMBA! V primeru dvoma glede tehnike gibanja s pomočjo palice se posvetujte z osebo, ki ima ustrezno znanje ali kvalifikacije.

4. Tehnična specifikacija

Tip palice	nastavljiva, s sedežem
Nastavitev višine	86-96 cm
Najv. nosilnost	159 kg
Teža	1 kg
Barva	črna

5. Opombe in priporočila

Timago International Group ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo palice, neupoštevanje varnostnih pravil ali uporabo v nasprotju z namenom.

- Pred vsako uporabo palice preverite, ali je vse v redu. Ne uporabljajte palice, če so opažene napake ali pomanjkljivosti.

6. Vzdrževanje

Elemente palice je treba redno vzdrževati:

- Sedež lahko čistite s hladno ali toplo vodo s pomočjo vlažne (ne mokre) krpe in brez uporabe detergentov. Trdovratnejše madeže očistite z gobico.

7. Pogoji shranjevanja in transporta

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, delovanju vode ali vlagi.

