

# ROČNI MEDICINSKI ASPIRATOR



## NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.si  
Web: www.medicaldirect.si

**SKU: YUWELL-7B-1**

## 1. UVOD

Pred prvo uporabo preverite, ali ima naprava kakršnekoli znake poškodb zaradi prevoza. V primeru poškodb se obrnite na prodajalca. Nato se seznanite z vsebino tega priročnika, ki vsebuje pomembne informacije za uporabnike. Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe naprave, se obrnite na nas. Naše osebje vam bo takoj zagotovilo potrebne informacije. Če imate vprašanja, ki niso povezana z našimi izdelki, se obrnite na svojega zdravnika ali fizioterapevta.

## 2. NAMEN

Aparat za ročno sesanje je prenosljiv, varen in praktičen za transport in uporabo. Lahko deluje brez napajanja. Večinoma se uporablja v bolnišnicah za sesanje krvi, sluzi in drugih gostih tekočin med kirurškimi operacijami.

## 3. STRUKTURA IN PRINCIP DELOVANJA

Struktura izdelka je večinoma sestavljena iz batnega valja, tekočinske posode za shranjevanje in podpornega okvirja.

Pritisnite ročico, da ustvarite podtlak s pomočjo izmeničnega gibanja bata v valju. V aspiracijskem sistemu se ne bo ustvaril nikakršen pozitivni tlak zaradi uporabe enosmernega ventila, kar vodi do varnega in zanesljivega delovanja.

Z zgoščeno strukturo, enostaven za uporabo, praktičen za prenašanje.

## 4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Maksimalni podtlak  $\geq 0,04\text{MPa}$

Maksimalni pretok  $\geq 20\text{L/min}$

Kapaciteta rezervoarja: 200 ml

Teža: 202g Velikost: 17×5×18 cm

## 5. ZNAČILNOSTI

Povezava (s sesalno cevjo, ki začasno ni priključena)

OPOMBA: Pazite na tesnjenje med nameščanjem.

Funkcionalni test

Blokirajte dovod zraka s prstom. Pritisnite ročico desetkrat, nato bo prst pritisnjen s podtlakom. Dvignite prst in zaslišite smešen zvok. Te izvedbe kažejo, da je sesalna naprava v dobrem stanju.

## 6. DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Pred uporabo preverite sesalno napravo kot metodo zagona, da se prepričate, da je v dobrem stanju. Nato začnite z delovanjem tako, da priključite sesalno cev in steriliziran mehki kateter.

Pritisnite ročico, da ustvarite ustrezen tlak glede na potrebo med uporabo.

Opomba 1: Pritisnite ročico z enakomerno silo od spodnje do zgornje meje, tako da črpalka deluje s polnim sesanjem.

Opomba 2: Izpraznite steklenico za shranjevanje, ko sluz doseže 1/2 prostornine, da se izognete zamašitvi.

Opomba 3: Z napravo morajo ravnati zdravstveni strokovnjaki. Pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik. Prosimo, obrnite se na dobavitelja ali proizvajalca, če imate kakršnakoli vprašanja.

Po uporabi izpraznite posodo za shranjevanje, očistite posodo in pokrov z mehko ščetko ali krpo ter sperite z vodo (vključno z vsemi cevmi).

Obrišite površino z rahlo vlažno krpo z razkužilom, pazite, da tekočina ne prodre v črpalko.

Ohranjajte čist izpust zraka.

## 7. VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Simptom	Verjetni razlogi	Rešitev
Ni podtlaka	1) Ohlapni spoji	1) Ponovno namestite
	2) Puščanje na pokrovu steklenice	2) Ponovno namestite ali zamenjajte tesnilni obroč
	3) Puščanje na čepu pokrova steklenice	3) Potisnite čep do konca
	4) Puščanje na mestih povezave	4) Ponovno pritrdite.
	5) Puščanje na izhodu zraka	5) Očistite ventil izhoda zraka